

КОНТРОЛІ Д-ДИМЕРУ

D-Dimer Control Set

Кат. №: 913701

Дата випуску інструкції: 2013/07
Версія 01



Основою при проведенні аналізу є оригінал інструкції англійською мовою, вкладеної в набір. Номер і дата версії оригіналу і перекладу інструкції повинні збігатися.

Склад: **Конц.**
913701 2 x 1 мл Набір контролів для Д-Димеру

Сироватка на основі людської для використання в якості контролів в імунотурбідиметричних аналізах для Д-Димеру

СКЛАД

Набір контролів для визначення Д-Димеру від Dialab на основі людської сироватки та добавок.

Азид натрію 0,095%

ПІДГОТОВКА

Набір контролів постачається у ліофілізованому вигляді (2x 1 мл).

СТАБІЛЬНІСТЬ І ЗБЕРІГАННЯ КОНТРОЛЮ

Зберігання: При температурі 2-8 °С
Стабільність: До закінчення терміну придатності
Стабільність після відновлення: 14 днів при температурі 2-8 °С
НЕ ЗАМОРОЖУВАТИ! Коли не використовується, зберігати щільно закритим.

ВКАЗІВКИ ЩОДО ВИКОРИСТАННЯ

1. Обережно відкрийте пробірку, щоб не розсипати ліофілізований матеріал.
2. Додайте 1,0 мл дистильованої води до пробірки. Уникайте утворення бульбашок.
3. Накрийте кришечкою та залишіть при кімнатній температурі на 30 хвилин, обережно інвертуючи, щоб розчинився вміст. Обережно перемішуйте перед кожним використанням.
4. Використовуйте таким чином як зразки.
5. Інтервали контролю повинні бути адаптовані для кожної лабораторії індивідуально. Для контролю якості дотримуйтеся діючих урядових та місцевих вимог.

ПОПЕРЕДЖЕННЯ І ЗАХОДИ БЕЗПЕКИ

1. Для використання в діагностиці in vitro.
2. Увесь донорський матеріал призначений для виробництва калібратора для протейну було протестовано за допомогою FDA тестів, і знайдений негативним до поверхневого антигену гепатиту В (HBsAg), до гепатиту С (анти-HCV) та анти-ВІЛ 1 та ВІЛ-2. Оскільки жоден метод тестування не може гарантувати, що продукти отримані з крові людини не містять вірусів ВІЛ-1/2 та вірусів гепатиту В та гепатиту С, тому з цим матеріалом та зі всіма зразками пацієнтів слід поводитися так, ніби вони здатні передавати інфекційні захворювання.
3. Реагенти, які містять азид натрію слід обробляти з обережністю: не ковтати, не допускати контакту з очима, шкірою або слизовими оболонками! При контакті з важкими металами азид натрію може утворювати вибухові азиди такі як мідь або свинець.

НЕОБХІДНІ МАТЕРІАЛИ, ЯКІ НЕ ПОСТАЧАЮТЬСЯ

- Аналіз DIALAB D-Dimer (турб.) (Кат. №: 913700)
- Дистильована вода

ЛІТЕРАТУРА

1. B/JH Guideline. British Journal of Haematology. 124, 15-25.
2. Alan H.B. Wu. Tietz Clinical Guide to Laboratory Tests. Fourth Ed. Saunders Elsevier, 11830 Westline Industrial Drive, St Louis, Missouri, 63146. 2006; 328-329

ДАННІ АНАЛІЗУ, ХАРАКТЕРНІ ДЛЯ ПАРТІЇ

ЛОТ: DDC001130-01-01		Термін придатності: 2014/10
Параметр	Задане значення	Діапазон
Контроль низьке значення	0,41 мкг FEU/мл	0,35 - 0,47 мкг FEU/мл
Контроль високе значення	2,26 мкг FEU/мл	1,92 - 2,60 мкг FEU/мл



ВИРОБНИК

Діалаб ГмБХ
Виробництво та продаж хіміко-технічної продукції та лабораторних приладів в ІЗ НОЕ-Зюд, Хондаштрассе, Обдъект М55, 2351
Вінер-Нойдорф
Тел.: +43 (0) 2236 660910-0,
Факс: +43 (0) 2236 660910-30,
e-mail: office@dialab.at



УПОВНОВАЖЕНИЙ ПРЕДСТАВНИК

ТОВ «ДІАМЕБ ТРЕЙД»
вул. Симона Петлюри, 25
м. Івано-Франківськ, 76014
тел.: +38 (0342) 775 122
факс: +38 (0342) 775 123
e-mail: info@diameb.ua
www.diameb.ua

