

КАІБРУВАЛЬНА ПЛАЗМА ДЛЯ АНТИТРОМБІНУ

95101, Dia-CAL AT III

Каталог. №: **95101**

Виробник: **Diagon (Угорщина)**

Методика від **02- 03-2009**

Версія: **1**



Основною при проведенні аналізу є оригінал інструкції англійською мовою, вкладеної в набір. Номер і дата версії оригіналу та перекладу інструкції повинні співпадати.

Кат. №: **95112**

12 x 1 мл

Кат. №: **95101**

1 x 1 мл

НАЗВА ПРОДУКТУ

Dia-CAL AT III.

ДІАПАЗОН ЗАСТОСУВАННЯ

Для забезпечення якості або контролю аналізів коагуляції антитромбіну III (AT III) для використання в In Vitro діагностиці.

ОПИС ПРОДУКТУ

Dia-CAL AT III (Кат. №: 90112, 90101) являє собою ліофілізовану, цитратно-антикоагульовану людську плазму, з вмістом коагулянтів в межах або поблизу референтних значень для нормальних індивідуумів. Цей калібратор є дійсним тільки для AT III.

ЗАСТЕРЕЖЕННЯ

Цей продукт містить речовину людського походження і може бути інфекційним. Продукт слід розглядати як зразок плазми. З метою мінімізації небезпеки інфекції, кожну одиницю плазми, яка була використана під час виробництва, перевірили і не виявили антитіл до ВІЛ, вірусу гепатиту В і вірусу гепатиту С.

РОЗВЕДЕННЯ

- 1) Перед відкриттям, потрусіть пляшку, щоб перемішати порошкоподібний матеріал, що накопичився на дні.
- 2) Додайте 1,00 мл деіонізованої води. Температура води повинна бути від 15 до 25 ° С.
- 3) Після додавання води знову закрийте пляшку і поверніть її десять або більше разів між долонями у вертикальному положенні, назад і вперед, щоб розчинити залишки порошку на внутрішній поверхні пляшки.
- 4) Через 15 хвилин калібрувальна плазма готова до використання. Перевірте, щоб весь матеріал повністю розчинився, якщо ні, використовуйте вортексний змішувач.

ЗБЕРІГАННЯ І СТАБІЛЬНІСТЬ

Закритий реагент стабільний до дати закінчення терміну за умови зберігання при температурі 2-8 °С.

Стабільність після розведення: 12 годин при 15 - 25°С в оригінальному флаконі.

12 годин при температурі 2 – 8 °С в оригінальному флаконі. (Переконайтеся, що перед використанням контроль кімнатної температури).

ВИРОБНИК



DIAGON Ltd.

Вул. Баросс, 52. 1047 Будапешт, Угорщина

Тел. :+36 1 369 6500,

Факс: +36 1 369 6301

Е- пошта: diagon@diagon.com

Веб: www.diagon.com



УПОВНОВАЖЕНИЙ ПРЕДСТАВНИК

ТОВ «ДІАМЕБ»
вул.Чорновола, 97
м. Івано-Франківськ, 76005
тел.: +38 (0342) 775 122
факс: +38 (0342) 775 123
e-mail:info@diameb.ua
www.diameb.com

© Переклад на українську мову ТОВ «ДІАМЕБ»

