

КАЛІБРАТОР БІЛКА ВИСОКИЙ

Protein Calibrator High

Кат. №: **A00703**

Дата випуску інструкції: **2012/11**

Версія **02**



Основною при проведенні аналізу є оригінал інструкції англійською мовою, вкладеної в набір. Номер і дата версії оригіналу та перекладу інструкції повинні співпадати.

Рідкий калібратор на основі людської плазми для використання під час калібрування імунотурбідиметричних аналізів

Кат. №	Склад	
A00580	1 x 1 мл	Калібратор протеїну високий
A00703	1 x 5 мл	Калібратор протеїну високий

СКЛАД

Калібратор протеїну від Діалаб – дефібринована плазма людини, стабілізована рідиною і відфільтрована через пористий фільтр 0,2мк.

Азид натрію 0.095 %

ПІДГОТОВКА

Калібратор рідкий, готовий до використання.

СТАБІЛЬНІСТЬ І ЗБЕРІГАННЯ

Зберігання: при 2-8 °С
Стабільність: до закінчення терміну придатності

Стабільність після відкриття до 6 тижнів при 2-8°С
НЕ ЗАМОРОЖУВАТИ

РЕКОМЕНДАЦІЇ З ВИКОРИСТАННЯ

- Використовуйте Калібратор в той же спосіб, як потрібно по відношенню до реагенту і/або апарату.
- Перед використанням дозволяйте Калібратору досягти кімнатної температури (22-28 °С).
- Калібратор не повинен залишатися протягом тривалого періоду часу (до 6 годин) при КТ. Тримайте невикористовувані флакони весь час щільно закритими, щоб уникнути мікробіологічного забруднення. Невикористані флакони зберігайте в холодильнику.

ПОПЕРЕДЖЕННЯ І ЗАСТЕРЕЖЕННЯ

- Для застосування в діагностиці in vitro.
- Кожна окрема порція донорської крові, використана для виготовлення протеїнового контролю, виявилася нереактивною під час перевірки затвердженими FDA методами на HbsAg, анти-HCV і анти-ВІЛ, і анти-ВІЛ 1+2. Оскільки немає можливості остаточно виключити передачу продуктами людської крові носіїв інфекцій, рекомендується поводитись з цим матеріалом і всіма зразками пацієнтів, як з такими, що можуть передавати інфекційні хвороби.
- З реагентами, що містять азид натрію, поводитись з особливою обережністю. Не вдихати і уникати контакту зі шкірою або слизовими.

РЕГУЛЮВАННЯ УТИЛІЗАЦІЇ ВІДХОДІВ

Посилайтеся на Ваші місцеві вимоги законодавства.

ДАНИ ДЛЯ КОНКРЕТНОЇ ПАРТІЇ

Значення і термін придатності залежать від партії набору.

ЛОТ: 04178	Термін придатності: 2022-10-31
Параметр	Призначене значення*
Альбумін*	13006 мг/дл
α-1 Антитрипсин*	435 мг/дл
α-2 Макроглобулін*	723 мг/дл
α-1 глікопротеїнова кислота*	241 мг/дл
Церулоплазмін*	90 мг/дл
Гаптоглобін*	351 мг/дл
Трансферин*	830 мг/дл
Імуноглобулін А*	658 мг/дл
Імуноглобулін G*	3077 мг/дл
Імуноглобулін M*	437 мг/дл
Комплемент С3*	328 мг/дл
Комплемент С4*	55 мг/дл

Антитромбін III**	76 мг/дл
С1 Естерази інгібітор **	58 мг/дл
Легкі ланцюжки каппа**	792 мг/дл
Легкі ланцюжки лямбда **	397 мг/дл
Преальбумін	72 мг/дл

*Значення, що простежуються до ERM-DA470k від IFCC.
**Значення на основі Матеріалу Siemens.



ВИРОБНИК

Діалаб ГмБХ

Виробництво та продаж хіміко-технічної продукції та лабораторних приладів в ІЗ НОЕ-Зюд, Хондаштрассе, Обджект М55, 2351

Вінер-Нойдорф

Тел.: +43 (0) 2236 660910-0,

Факс: +43 (0) 2236 660910-30,

e-mail: office@dialab.at



УПОВНОВАЖЕНИЙ ПРЕДСТАВНИК

ТОВ «ДІАМЕБ ТРЕЙД»
вул. Симона Петлюри, 25
м. Івано-Франківськ, 76014
тел.: +38 (0342) 775 122
факс: +38 (0342) 775 123
e-mail: info@diameb.ua
www.diameb.ua

