

# КАЛІБРАТОР МІКРОАЛЬБУМІНУ

## Microalbumin Calibrator

Каталог. №: **A00708**

Дата випуску інструкції: **11-2012**  
Версія **02**



Основою при проведенні аналізу є оригінал інструкції англійською мовою, вкладеної в набір. Номер і дата версії оригіналу та перекладу інструкції повинні співпадати.

**Рідкий реактив на основі продуктів людської життєдіяльності, призначений для використання в якості калібратора в імунотурбідиметричних аналізах для мікроальбуміну**

### Состав:

**A00707** 1 x 1 мл Калібратор мікроальбуміну  
**A00708** 1 x 5 мл Калібратор мікроальбуміну

### КОМПОЗИЦІЯ

Калібратор Dialab мікроальбуміну заснований на дефібринованій плазмі людини з фосфатним буферним сольовим розчином, стабілізований рідиною і відфільтрований через фільтр 0.2 мк.  
Азид натрію 0.095%

### ПІДГОТОВКА

Калібратор мікроальбуміну є рідким, готовим до використання.

### СТАБІЛЬНІСТЬ ТА ЗБЕРІГАННЯ

Зберігання: при 2 - 8 °C  
Стабільність: до закінчення терміну придатності  
Стабільність після відкриття: 6 тижнів при температурі від 2 до 8 °C  
НЕ ЗАМОРОЖУВАТИ!

### ІНСТРУКЦІЯ З ВИКОРИСТАННЯ

- Використовувати даний Калібратор таким же чином, як і використовуваний реагент і/або інструмент.
- Привести Калібратор до кімнатної температури (22-28 °C) перед використанням.
- Не допускати зберігання Калібратора протягом тривалого часу (до 6 годин) при кімнатній температурі. Зберігати флакони завжди щільно запечатаними, якщо вони не використовуються, щоб уникнути бактеріального зараження. Зберігати флакони охолодженими, якщо вони не використовуються.

### ПОПЕРЕДЖЕННЯ І ЗАХОДИ БЕЗПЕКИ

- Тільки для використання в in-Vitro діагностиці.
- Кожна окремо взята донорська здача крові, призначена для використання у виробництві протеїнового калібратора, була протестована на поверхневий антиген гепатиту В (HBsAg), антитіла до вірусу гепатиту С (анти-HCV) і анти-HIV 1 і HIV 2 за допомогою тестів, встановлених Управлінням з контролю за продуктами і ліками (США). Оскільки ніякої метод тестування не може гарантувати, що продукти, отримані з крові людини, не містять HIV- 1/2, Гепатит В і Гепатит С, поводитись з усіма матеріалами та зразками пацієнтів як з потенційно інфекційними.
- Поводитись з реагентами, що містять азид натрію, з належною обережністю. Не ковтати і не допускати контакту зі шкірою та слизовими! Азид натрію може призвести до утворення вибухових азидів при контакт з важкими металами, такими як мідь або свинець.

### УПРАВЛІННЯ ВІДХОДАМИ

Посилатися на місцеві легальні вимоги по знищенню відходів.

### ДАНІ АНАЛІЗУ, ХАРАКТЕРНІ ДЛЯ ПАРТІЇ

Об'єми та термін придатності характерні для конкретної партії.

| ЛОТ: 03367   |  | Термін придатності: 2021-09 |  |
|--|--|-----------------------------|--|
| Параметр   |  | Призначене значення         |  |
| Мікроальбумін  |  | 400.0 мг/л                  |  |
| Значення простежуються відповідно до RPPHS/ERM-DA470 від IFCC. |  |                             |  |



### ВИРОБНИК

Діалаб GmbH  
Виробництво та продаж хіміко-технічної продукції та лабораторних приладів в ІЗ НОЕ-Зюд, Хондастрас, Обджект М55, 2351 Вінер-Нойдорф  
Тел.: +43 (0) 2236 660910-0,  
Факс: +43 (0) 2236 660910-30,  
e-mail: [office@dialab.at](mailto:office@dialab.at)



### УПОВНОВАЖЕНИЙ ПРЕДСТАВНИК

ТОВ «ДІАМЕБ ТРЕЙД»  
вул. Симона Петлюри, 25  
м. Івано-Франківськ, 76014  
тел.: +38 (0342) 775 122  
факс: +38 (0342) 775 123  
e-mail: [info@diameb.ua](mailto:info@diameb.ua)  
[www.diameb.ua](http://www.diameb.ua)

