

КОНТРОЛЬ АСЛО

ASO Control



ВИРОБНИК

Діалаб ГмБХ
Виробництво та продаж хіміко-технічної
продукції та лабораторних приладів в ІЗ
НОЕ-Зюд, Хондаштрассе, Обджект М55, 2351
Вінер-Нойдорф
Тел.: +43 (0) 2236 660910-0,
Факс: +43 (0) 2236 660910-30,
e-mail: office@dialab.at

Каталог. №: **A00812**

Дата випуску інструкції: **11-2012**
Версія **02**



Основою при проведенні аналізу є оригінал інструкції англійською мовою, вкладеної в набір. Номер і дата версії оригіналу та перекладу інструкції повинні співпадати.

Склад:
A00812 1 x 1 мл Контроль АСЛО
A00813 1 x 5 мл Контроль АСЛО

КОМПОЗИЦІЯ

Контроль АСЛО від Dialab - на основі сироватки людини, містить високі рівні АСЛО з фосфатним буферним розчином, що містить 1 г % бичачої сироватки альбуміну.

Азид натрію 0.095%

ПІДГОТОВКА РЕАГЕНТІВ

Контроль АСЛО рідкий, готовий до використання.

СТАБІЛЬНІСТЬ І ЗБЕРІГАННЯ РЕАГЕНТІВ

Зберігання: При 2-8 °С
Стабільність: До закінчення терміну придатності
Стабільність після відкриття: 6 тижнів при 2 – 8 °С
НЕ ЗАМОРОЖУВАТИ!

ПРОЦЕДУРА ТЕСТУ

- Використовуйте цей контроль таким же чином, як зазначений реагент та/або прилад, що використовується.
- Перед використанням контролю доведіть його до кімнатної температури (22-28 °С).
- Не настоюйте контроль впродовж тривалого періоду часу (до 6 годин) при кімнатній температурі. Зберігайте флакони щільно закритими в будь-який час, коли вони не використовуються, щоб уникнути мікробного забруднення. Зберігайте флакони в холодильнику, коли вони не використовуються.

ПОПЕРЕДЖЕННЯ І ЗАСТЕРЕЖЕННЯ

- Для діагностики *in vitro*.
- Кожна донорська одиниця, призначена для використання у виробництві білкового калібратора, була перевірена на наявність поверхневих антигенів гепатиту В (HBsAg), гепатиту С (проти ВІЛ-інфекції) та анти-ВІЛ-1 та ВІЛ-2 за вимогами FDA. Оскільки тестовий метод не може гарантувати, що продукти, отримані з крові людини, не містять вірусу ВІЛ-1/2 та гепатиту С, цей матеріал та всі зразки пацієнтів повинні оброблятися так, ті, що можуть передавати інфекційні захворювання.
- Реагенти, що містять азид натрію, повинні оброблятися з належною обережністю: не приймати та не допускати контакту зі шкірою та слизовими оболонками! Азид натрію може утворювати вибухонебезпечні азиди при контакті з важкими металами, такими як мідь або свинець.

ПОВОДЖЕННЯ З ВІДХОДАМИ

Будь ласка, зверніться до місцевих вимог.

ДАНИ АНАЛІЗУ КОНКРЕТНОГО ЛОТУ

ЛОТ: S2081	ТЕРМІН ПРИДАТНОСТІ: 2015/11	
Параметр	Цільове значення	Діапазон
АСЛО*	99.0 О/мл	84.0 – 114.0 О/мл
АСЛО**	163.0 О/мл	139.0 – 187.0 О/мл
* простежений за стандартизацією ВООЗ		
** відстежується за стандартизацією Dade Behring		



УПОВНОВАЖЕНИЙ ПРЕДСТАВНИК

ТОВ «ДІАМЕБ ТРЕЙД»
вул. Симона Петлюри, 25
м. Івано-Франківськ, 76014
тел.: +38 (0342) 775 122
факс: +38 (0342) 775 123
e-mail: info@diameb.ua
www.diameb.ua

