

# КАЛІБРАТОРИ ЛІПОПРОТЕЇНУ (а) (4 РІВНІ)

## Lp (a) Calibrator 4 level Series

Каталог. №: A03736

Дата випуску інструкції: 2012/11

Версія 03



Основою при проведенні аналізу є оригінал інструкції англійською мовою, вкладеної в набір. Номер і дата версії оригіналу та перекладу інструкції повинні співпадати.

Рідкий калібратор, людського походження, призначений для використання в якості калібратора в імунострубідиметричних аналізах для Lp(a)

Кат. №	Вміст	
A03736	4 x 1 мл	4-Рівневий Lp(a) Калібратор

### СКЛАД

Dialab Серія Lp (a) Калібратора – це дефібринована і деліпідована людська плазма.

Азид натрію: 0.095 %

### ПІДГОТОВКА

Серія Lp (a) Калібратора є рідким, і готовим до використання.

### ЗБЕРІГАННЯ І СТАБІЛЬНІСТЬ

Зберігання: при температурі 2-8 °C

Стабільність: до закінчення терміну придатності

Стабільність після відкриття: 6 тижнів при 2-8 °C

НЕ ЗАМОРОЖУВАТИ!

### ПРАВИЛА ВИКОРИСТАННЯ

- Використовуйте ці Калібратори таким же чином, як вказано по відношенню до реагенту і /або приладу, який використовується.
- Дозвольте Калібраторам досягнути кімнатної температури (22-28 °C) перед використанням.
- Калібратори не можна залишати протягом тривалого періоду часу (до 6 годин) при кімнатній температурі. Тримайте флакони весь час щільно закритими, щоб уникнути мікробного забруднення. Невикористовані флакони зберігайте в холодильнику.

### ПОПЕРЕДЖЕННЯ І ЗАСТРЕЖЕННЯ

- Для використання в *in vitro* діагностиці.
- Кожна окрема донорська одиниця використана для виготовлення білкового калібратора, була протестована на гепатит В поверхневий антиген (HbsAg), вірус анти-гепатит С (анти-HVC) і анти-VIL 1 та VIL- 2 за вимогами FDA. Оскільки, тестовий метод не може остаточно гарантувати, що продукти отримані з крові людини не містять вірусу ВІЛ-1/2, гепатиту В і Гепатиту С, цей матеріал та всі зразки пацієнта повинні оброблятися, так, щоб уникнути мікробного забруднення. Невикористовані флакони зберігайте в холодильнику.
- Реагенти, які містять азид натрію потрібно обробляти з особливою обережністю: не ковтати, уникати контакту зі шкірою або слизовою! Азид натрію може утворювати вибухонебезпечні азиди при контакті з важкими металами, такими як мідь або свинець.

### ПОВОДЖЕННЯ З ВІДХОДАМИ

Відповідно до місцевих правил.

### ДАНІ АНАЛІЗУ КОНКРЕТНОГО ЛОТУ

Значення і термін придатності є специфічними для кожного лоту.

ЛОТ: S4077	Термін придатності: 2013/04	
Параметр	Рівень	Визначене значення
Lp(a)	Рівень 1	15.80 мг/дл
Lp(a)	Рівень 2	24.60 мг/дл
Lp(a)	Рівень 3	47.50 мг/дл
Lp(a)	Рівень 4	92.10 мг/дл
Значення відстежуються до Міжнародної Референтної SRM 2B Стандартизації		



### ВИРОБНИК

Діалаб ГмбХ

Виробництво та продаж хіміко-технічної продукції та лабораторних приладів в ІЗ НОЕ-Зюд, Хондаштрассе, Обджект M55, 2351

Вінер-Нойдорф

Тел.: +43 (0) 2236 660910-0,

Факс: +43 (0) 2236 660910-30,

e-mail: [office@dialab.at](mailto:office@dialab.at)



### УПОВНОВАЖЕНИЙ ПРЕДСТАВНИК

ТОВ «ДІАМЕБ ТРЕЙД»

вул. Симона Петлюри, 25

м. Івано-Франківськ, 76014

тел.: +38 (0342) 775 122

факс: +38 (0342) 775 123

e-mail: [info@diameb.ua](mailto:info@diameb.ua)

[www.diameb.ua](http://www.diameb.ua)

