

# ГЛЮКОЗА, GOD - PAP

## Glucose, GOD-PAP

Каталог. №: D08220

Дата випуску інструкції: 16-01-2009  
Версія 04



Основою при проведенні аналізу є оригінал інструкції англійською мовою, вкладеної в набір. Номер і дата версії оригіналу та перекладу інструкції повинні співпадати.

|               |             |                   |
|---------------|-------------|-------------------|
| <b>Склад:</b> |             |                   |
| D95218B       | 1 x 1000 мл | Одиночний реагент |
| D08220        | 4 x 250 мл  | Одиночний реагент |
| D00221        | 5 x 100 мл  | Одиночний реагент |
| D98221        | 5 x 50 мл   | Одиночний реагент |
| D00223        | 5 x 25 мл   | Одиночний реагент |
| D00224        | 5 x 10 мл   | Одиночний реагент |
| DA0827*       | 5 x 50 мл   | Одиночний реагент |

Додатково пропонуються:

|        |           |                     |             |
|--------|-----------|---------------------|-------------|
| D95223 | 1 x 3 мл  | Стандарт Глюкози    |             |
| D98485 | 5 x 3 мл  | Калібратор          | Diacal Auto |
| D98481 | 12 x 5 мл | Нормальний контроль | Diacon N    |
| D98482 | 12 x 5 мл | Аномальний контроль | Diacon P    |

### ПАРАМЕТРИ ТЕСТУ

|                      |   |
|----------------------|---|
| <b>Метод</b>         | Метод колориметричної, кінцевої точки, зростаючої реакції GOD - PAP |
| <b>Довжина хвилі</b> | 500 нм, Нг 546 нм   |
| <b>Температура</b>   | 20-25 °С або 37 °С  |
| <b>Зразок</b>        | Сироватка, гепаринова або ЕДТК - плазма                             |
| <b>Лінійність</b>    | До 490 мг/дл (на Hitachi 911)                                       |
| <b>Чутливість</b>    | Нижня межа визначення 1 мг/дл                                       |

### КОМПОЗИЦІЯ РЕАКТИВУ

|                         |                     |
|-------------------------|---------------------|
| <b>КОМПОНЕНТИ</b>       | <b>КОНЦЕНТРАЦІЯ</b> |
| Фосфатний буфер, рН 7.5 | 250 ммоль/л         |
| Фенол                   | 5 ммоль/л           |
| 4-Аміноантипирин        | 0.5 ммоль/л         |
| Оксидаза глюкози        | > 10 кО/л           |
| Пероксидаза             | > 1 кО/л            |

### ПІДГОТОВКА РЕАКТИВУ

Реактив готовий до використання.

### СТАБІЛЬНІСТЬ І ЗБЕРІГАННЯ РЕАКТИВУ

|               |   |
|---------------|---|
| Умови:        | Не допускати попадання світла<br>Закрити негайно після використання |
| Зберігання:   | При температурі 2-8 °С  |
| Стабільність: | До закінчення терміну придатності<br>Реагент не заморожувати!       |

**Примітка:** Легка зміна кольору реагенту не впливає на роботу тесту, за умови, що спектральна поглинальна здатність < 0.3 при 546 нм.

### СТАБІЛЬНІСТЬ І ЗБЕРІГАННЯ ЗРАЗКА

Відокремити клітинний вміст не пізніше, ніж через 1 годину після взяття зразка.

Стабільність після додавання гліколітичного інгібітора (фториди, моноацетату, манози) [4]:

|  |   |
|--|---|
| Стабільність:  | При температурі 20 - 25 °С 2 дні<br>При температурі 4 - 8 °С 7 днів |
| Стабільність в сироватці (відокремленої від клітинного вмісту, негемолізованої) без додавання гліколітичного інгібітора [2,5]: |   |

|               |   |
|---------------|---|
| Стабільність: | При температурі 25 °С 8 годин<br>При температурі 4 °С 72 години |
|---------------|---|

Позбутися від забруднених зразків.

### СТАНДАРТ

(Замовляється окремо)

|               |                                  |
|---------------|----------------------------------|
| Концентрація: | 100 мг/дл                        |
| Зберігання:   | 2 - 25 °С                        |
| Стабільність: | До закінчення строку придатності |

ЗАКРИТИ НЕГАЙНО ПІСЛЯ ВИКОРИСТАННЯ!

### ІНТЕРФЕРУЮЧІ РЕЧОВИНИ

|                        |                   |
|------------------------|-------------------|
| Немає інтерференції з: | При значеннях до: |
| Аскорбінова кислота    | 15 мг/дл          |
| Білірубін              | 40 мг/дл          |
| Гемоглобін             | 200 мг/дл         |
| Тригліцериди           | 2000 мг/дл        |

### ІНСТРУКЦІЯ З ПРОВЕДЕННЯ ТЕСТУ

Привести реагенти та зразки до кімнатної температури.

#### Зразки сироватки або плазми:

| Піпетувати в тестові пробірки | Контрольний зразок | Стандарт/Калібратор | Зразок   |
|-------------------------------|--------------------|---------------------|----------|
| Реагент                       | 1000 мкл           | 1000 мкл            | 1000 мкл |
| Зразок                        | -                  | -                   | 10 мкл   |
| Стандарт/Калібратор           | -                  | 10 мкл              | -        |

Змішати і інкубувати протягом 10 хвилин при температурі 37 °С або 20 хвилин при температурі 20-25 °С. Зчитати результати тесту зразка і стандарту/контролю через 60 хвилин і порівняти їх з контрольним реагентом.

#### ПІДРАХУНОК (товщина світлопоглинаючого шару 1 см)

Глюкоза (мг/дл) = ΔА Зразка/ΔА Стандарту/Калібратора x Концентрат Стандарту/Калібратора (мг/дл)

#### КОЕФІЦІЄНТ ПОГОДЖЕННЯ

Мг/дл x 0.05551 = ммоль/л

#### ОЧІКУВАНІ ЗНАЧЕННЯ\* [1] (мг/дл)

| Новонароджені:        |        |
|-----------------------|--------|
| Пуповинна кров        | 63-158 |
| Через 1 годину        | 36-99  |
| Через 2 години        | 36-89  |
| 5 - 14 годин          | 34-77  |
| 10 - 28 годин         | 46-81  |
| 44 - 52 годин         | 48-79  |
| Діти (натщесерце):    |        |
| 1 - 6 років           | 74-127 |
| 7 - 19 років          | 70-106 |
| Дорослі (натщесерце): |        |
| Сироватка/плазма      | 70-115 |

\* Рекомендується кожній лабораторії встановити свій контрольний діапазон.

#### ПРИНЦИП РАБОТИ ТЕСТУ (Див. оригінал інструкції).

#### РОБОЧІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

##### Лінійність:

Аналіз є лінійним при величинах до 490 мг/дл (на Аналізаторі Hitachi 911). Якщо концентрація зразка перевищує значення 490 мг/дл, його необхідно розвести з NaCl (9 г/л хлориду натрію у воді) і повторити аналіз. Результат помножити на коефіцієнт розведення.

#### Точність (при 37 °С)

| В аналізі n = 20 | Середнє значення (мг/дл) | СВ (мг/дл) | КВ (%) |
|------------------|--------------------------|------------|--------|
| Взірець 1        | 64.2                     | 1.12       | 1.74   |
| Взірець 2        | 122                      | 1.57       | 4.41   |
| Взірець 3        | 296                      | 4.41       | 1.49   |

| Між аналізами n = 20 | Середнє значення (мг/дл) | СВ (мг/дл) | КВ (%) |
|----------------------|--------------------------|------------|--------|
| Взірець 1            | 92.5                     | 1.10       | 1.19   |
| Взірець 2            | 121                      | 1.02       | 2.01   |
| Взірець 3            | 292                      | 2.01       | 0.69   |

#### ПОРІВНЯННЯ МЕТОДІВ

Порівняння Dialab Аналізу Глюкози (y) і комерційно доступного аналізу (x) з використанням 78 зразків дало наступні результати:  
 $Y = 1.00x + 1.00$  мг/дл;  $r = 0.996$ .

#### КОНТРОЛЬ ЯКОСТІ

Можуть бути використані всі контрольні сироватки зі значеннями Глюкози, отриманими даними методом.

Ми рекомендуємо:

Кат. №      Склад

|               |           |                 |                             |             |
|---------------|-----------|-----------------|-----------------------------|-------------|
| <b>D98481</b> | 12 x 5 мл | <b>DIACON N</b> | Нормальний зразок сироватки | контрольний |
| <b>D98482</b> | 12 x 5 мл | <b>DIACON P</b> | Аномальний зразок сироватки | контрольний |

#### КАЛІБРУВАННЯ

Аналіз вимагає використання Стандарту або калібратора.  
Ми рекомендуємо:

| Кат. №        | Склад    |                         |                                       |  |
|---------------|----------|-------------------------|---------------------------------------|--|
| <b>D95223</b> | 1 x 3 мл | <b>СТАНДАРТ ГЛЮКОЗИ</b> |                                       |  |
| <b>D98485</b> | 5 x 3 мл | <b>DIACAL AUTO</b>      | Мультикалібрувальний зразок сироватки |  |

#### АВТОМАТИЗАЦІЯ

Спеціальні адаптації для автоматичних аналізаторів можуть бути зроблені за запитом.

#### ПОПЕРЕДЖЕННЯ ТА ЗАХОДИ БЕЗПЕКИ

1. Реагент містить азид натрію (0.95 г/л) як консервант. Не ковтати! Уникати контакту зі шкірою та слизовою оболонкою.
2. Дотримуватися необхідних заходів безпеки при використанні лабораторних реактивів.

#### ПОВОДЖЕННЯ З ВІДХОДАМИ

Будь ласка, зверніться до місцевих вимог.



#### ВИРОБНИК

*Діалаб GmbH*  
Виробництво та продаж хіміко-технічної продукції та лабораторних приладів в ІЗ НОЕ-Зюд, Хондастрас, Обджект М55, 2351 Вінер-Нойдорф  
Тел.: +43 (0) 2236 660910-0,  
Факс: +43 (0) 2236 660910-30,  
e-mail: [office@dialab.at](mailto:office@dialab.at)



#### УПОВНОВАЖЕНИЙ ПРЕДСТАВНИК

ТОВ «ДІАМЕБ ТРЕЙД»  
вул. Симона Петлюри, 25  
м. Івано-Франківськ, 76014  
тел.: +38 (0342) 775 122  
факс: +38 (0342) 775 123  
e-mail: [info@diameb.ua](mailto:info@diameb.ua)  
[www.diameb.ua](http://www.diameb.ua)

