

# ДІЛЮЕНТ DIATRO DIL-5P

## Diatro Dil-5P

Кат. №: **D1512**

Дата випуску інструкції: **30-03-2022**  
Версія **4.2**



Основою при проведенні аналізу є оригінал інструкції англійською мовою, вкладеної в набір. Номер і дата версії оригіналу та перекладу інструкції повинні співпадати.

### Diatro-Dil-5P

Розчинник для автоматизованого аналізу

Код товару: **D1512** 20 л (L)

Тільки для використання в *in vitro* діагностиці

### ПРИЗНАЧЕННЯ ДЛЯ ВИКОРИСТАННЯ

Розчинник Diatro-Dil-5P являє собою буферизований, стабілізований та мікрофільтрований розчин електроліту для автоматизованого розведення зразків крові людини, кількісного та якісного визначення еритроцитів (RBC), лейкоцитів (WBC) і субпопуляцій лейкоцитів, тромбоцитів (PLT) і вимірювання концентрації гемоглобіну (HGB) на гематологічних аналізаторах Diatron.

Розчинник Diatro-Dil-5P слід використовувати тільки з реагентами Diatron. Помилкові результати можуть бути отримані, якщо реагент застосовується з реагентами іншого виробника.

Будь ласка, зверніться до керівництва користувача приладу для отримання додаткової інформації.

### ІНГРЕДІЕНТИ

Хлорид натрію ..... < 1%  
Буфери ..... < 1.1%  
Консервант ..... < 0.4 %  
Стабілізатори ..... < 0.4%  
у неіонізованій воді

### ЗАСТЕРЕЖЕННЯ

- Розчинник Diatro-Dil-5P не шкідливий для навколишнього середовища реагент, що не містить азиду; не містить шкідливих інгредієнтів.
- Уникати контакту з очима, шкірою та одягом.
- У разі потрапляння в очі або на шкіру промити очі великою кількістю води протягом декількох хвилин або вимити шкіру водою.
- Зберігати контейнер з реагентом закритим, коли він не використовується.
- Одягти лабораторні рукавички при роботі з реагентом.
- Всі зразки біологічних рідин повинні розглядатися як потенційно інфекційний матеріал. Розглядати всю кров і інші потенційно інфіковані матеріали з відповідними пересторогами. Використовуйте рукавички, маски і халати, якщо передбачається контакт з кров'ю.
- Будь ласка, зверніться до листа безпеки, пов'язаного з реагентом.
- Дотримуйтесь правил належної лабораторної практики (GLP) під час роботи з реагентами.

### ЗАБІР І ПІДГОТОВКА ЗРАЗКА

Реагент Diatro-Dil-5P призначений для використання із зразками крові, зібраними венепункцією в ЕДТА антикоагулянт. Зразки для гематологічного аналізу можуть зберігатися до 8 годин при температурі 15-30 °C (°C) або до 24 годин після збору в холодильнику (2-8 °C (°C)).

### ПІДГОТОВКА РЕАГЕНТІВ

- Цей реагент готовий до використання і може бути застосований безпосередньо з контейнера; ніякої спеціальної підготовки реагенту не потрібно.
- Залиште реагент при кімнатній температурі протягом не менше 12 годин.

### ЗАМІНА РЕАГЕНТУ

- Особа, що встановлює реагент, повинна бути навченим лабораторним працівником.
- Зняти впускний ковпачок з контейнера реагенту, який повинен бути замінений. Підключити впускний отвір реагенту до нового контейнера з реагентом.
- Переконайтеся, що колір на кожній трубці, етикетці контейнера з реагентом і роз'єм на задній частині інструменту співпадають.
- Уникати забруднення пилом або мікробного забруднення трубопроводу і реагентів. Не зливати і не змішувати залишки реагенту з одного контейнера в інший.
- Праймувати ретельно новий реагент і виміряти фон відповідно до Інструкції користувача приладу.
- При установці нової партії реагенту, відкалібрувати прилад, як вказано в Інструкції користувача.

### ЗБЕРІГАННЯ, СТАБІЛЬНІСТЬ І УТИЛІЗАЦІЯ РЕАГЕНТУ

- Зберігати Розчинник Diatro-Dil-5P при температурі від +4 до +32 °C (°C).
- Термін придатності Diatro-Dil-5P становить 36 місяців з дати виготовлення, при зберіганні в заданому температурному діапазоні.
- Не використовувати реагент після закінчення терміну придатності, зазначеного на етикетці контейнера.
- Викинути відкритий контейнер через 120 днів.
- Не використовувати реагент після заморожування.
- Утилізувати відходи, невикористаний продукт і забруднені упаковки відповідно до місцевих правил утилізації.

У разі будь-яких проблем зверніться до місцевого офіційного дистриб'ютора Diatron для усунення несправностей.



### ВИРОБНИК

ДІАТРОН МІ Плс.  
H-1097 м. Будапешт,  
вул. Таблас, 39  
Угорщина  
Тел.: +36 14369800  
Факс: +36 14369809  
[www.Diatron.com](http://www.Diatron.com)

DIATRON MI Plc.  
H-1097 Budapest,  
Táblás street, No. 39,  
Hungary  
Phone: +36 14369800  
Fax: +36 14369809  
[www.Diatron.com](http://www.Diatron.com)



### УПОВНОВАЖЕНИЙ ПРЕДСТАВНИК

ТОВ «ДІАМЕБ ТРЕЙД»  
вул. Симона Петлюри, 25  
м. Івано-Франківськ, 76014  
тел.: +38 (0342) 775 122  
e-mail: [info@diameb.ua](mailto:info@diameb.ua)  
[www.diameb.ua](http://www.diameb.ua)

