

КОНТРОЛЬ ДІОКСИДУ ВУГЛЕЦЮ (CO₂)

CO₂ Control

Каталог. №: **D16525**

Дата випуску інструкції: **2016/03/31**
Версія **01**



Основою при проведенні аналізу є оригінал інструкції англійською мовою, вкладеної в набір. Номер і дата версії оригіналу та перекладу інструкції повинні співпадати.

Контрольний матеріал для контролю якості кількісного визначення in vitro двоокису вуглецю (CO₂ бікарбонат) у сироватці або плазмі людини у фотометричних системах.

Кат. №	Вміст	
D16525	3 x 3 мл	Набір
D16525SV	1x 3 мл	Одинарний флакон

СКЛАД КОНТРОЛЮ

Водний розчин з хімічними добавками.
Азид натрію (NaN₃) < 0.1%

ПІДГОТОВКА КОНТРОЛЮ

Контроль є рідким і готовий до використання.

ПРОЦЕДУРА ТЕСТУ

Будь ласка, зверніться до вкладиша реагенту для отримання інструкцій щодо застосування.

ЗБЕРІГАННЯ І СТАБІЛЬНІСТЬ КОНТРОЛЮ

Температура зберігання: від +2 до +25 °C
Стабільність: до кінця місяця, зазначеного в терміні придатності

Стабільність після відкриття: 3 місяці, якщо закрити одразу після використання

Необхідно дотримуватися належного зберігання та поводження з цим продуктом.

ПОПЕРЕДЖЕННЯ І ЗАСТРЕЖЕННЯ

1. Містить азид натрію (0.95 г / л) як консервант. Не ковтати! Уникайте контакту зі шкірою і слизовими оболонками.
2. Будь ласка, зверніться до листів безпеки та вживайте необхідних запобіжних заходів для використання калібраторів та контролів.
3. Тільки для професійного використання!

ПОВОДЖЕННЯ З ВІДХОДАМИ

Відповідно до місцевих правил.

ПОСИЛАННЯ

1. Röhle G, Siekmann L. Quality assurance of quantitative determination. In: Thomas L, editor. Clinical laboratory diagnostics. 1st ed. Frankfurt: TH-Books Verlagsgesellschaft; 1988. P.1393-1401.

КОНТРОЛЬНЕ ЗНАЧЕННЯ

Лот №:	Термін придатності	Тестове значення [ммоль/л]	Діапазон [ммоль/л]
25325	2019-05	20.0	16.0-24.0



ВИРОБНИК

Діалаб ГмбХ
Виробництво та продаж хіміко-технічної продукції та лабораторних приладів в ІЗ НОЕ-Зюд, Хондаштрассе, Обджект М55, 2351 Вінер-Нойдорф
Тел.: +43 (0) 2236 660910-0,
Факс: +43 (0) 2236 660910-30,
e-mail: office@dialab.at



УПОВНОВАЖЕНИЙ ПРЕДСТАВНИК

ТОВ «ДІАМЕБ ТРЕЙД»
вул. Симона Петлюри, 25
м. Івано-Франківськ, 76014
тел.: +38 (0342) 775 122
факс: +38 (0342) 775 123
e-mail: info@diameb.ua
www.diameb.ua

