

ПРОМИВНИЙ РОЗЧИН DIATRO HYPOCLEAN CC

Diatro Hypoclean CC

Кат. №: **D8011**

Дата випуску інструкції: **30-03-2022**
Версія **4.2**



Основою при проведенні аналізу є оригінал інструкції англійською мовою, вкладеної в набір. Номер і дата версії оригіналу та перекладу інструкції повинні співпадати.

Diatro-Hypoclean CC

Гіпохлоритний концентрат промивного розчину для автоматизованого аналізу

Код продукту: **D8011** 100 мл (ml)

Тільки для використання в *in Vitro* діагностиці

ПРИЗНАЧЕННЯ ДЛЯ ВИКОРИСТАННЯ

Гіпохлоритний Концентрат Промивного розчину Diatro-Hypoclean CC являє собою стабілізований і мікрофільтрований концентрований гіпохлоритний розчин для інтенсивного окисного очищення, ополіскування та промивки капілярів, трубок і камер гематологічного аналізатора, видалення компонентів осаду крові і ліпопротеїнових відкладень на всіх гематологічних аналізаторах.

Гіпохлоритний Концентрат Промивного розчину Diatro-Hypoclean CC слід використовувати тільки з реагентами Diatron. Помилкові результати можуть бути отримані, якщо реагент застосовується з реагентами від іншого виробника.

Будь ласка, зверніться до керівництва користувача приладу для отримання додаткової інформації.

ІНГРЕДІЄНТИ

Детергенти < 1.0 %
Гіпохлорит натрію < 5.0 %
Гідроксид натрію < 0.5 %
Стабілізатори < 0.5 %
у неіонізованій воді

ЗАСТЕРЕЖЕННЯ

- Гіпохлоритний Концентрат Промивного розчину Diatro-Hypoclean CC містить гіпохлорит натрію в сильно лужному розчині.
- Уникати контакту з очима, шкірою та одягом.
- У разі потрапляння в очі або на шкіру промити очі великою кількістю води протягом декількох хвилин або вимити шкіру водою.
- У разі ковтання НЕ викликати блювоту. Пийте багато води і зверніться до лікаря. Остерігайтеся аспірації, якщо має місце блювота.
- Одягати лабораторні рукавички при роботі з реагентом.
- Всі зразки біологічних рідин повинні розглядатися як потенційно інфекційний матеріал. Розглядати всю кров і інші потенційно інфіковані матеріали з відповідними пересторогами. Використовуйте рукавички, маски і халати, якщо передбачається контакт з кров'ю.
- Будь ласка, зверніться до листа безпеки, пов'язаного з реагентом.
- Дотримуйтеся правил належної лабораторної практики (GLP) під час роботи з реагентами.

ЗАБІР І ПІДГОТОВКА ЗРАЗКА

Гіпохлоритний Концентрат Промивного розчину Diatro-Hypoclean CC призначений для використання із зразками крові, зібраними венепункцією в ЕДТК-антикоагулянт. Зразки для гематологічного аналізу можуть зберігатися до 8 годин при температурі 15-30 °C (°C) або до 24 годин після збору в холодильнику (2-8 °C (°C)).

ПІДГОТОВКА РЕАГЕНТІВ

- Цей реагент готовий до використання і може бути застосований безпосередньо з контейнера; ніякої спеціальної підготовки реагентів не потрібно.
- Залиште реагент при кімнатній температурі протягом не менше 12 годин.

ЗАМІНА РЕАГЕНТУ

- Особа, що встановлює реагент, повинна бути навченим лабораторним працівником.
- Під час щоденної процедури технічного обслуговування аспірувати м'якущий засіб через зонд. Виконайте цикл очищення, як зазначено в керівництві користувача приладу.
- Якщо результати бланк-вимірювання занадто високі або з'являються неприйнятні результати, піпетувати концентрований реагент безпосередньо в відповідну камеру згідно з інструкцією користувача приладу. Зачекайте, щоб провести ефективну очистку і провести вимірювання бланка.

ЗБЕРІГАННЯ, СТАБІЛЬНІСТЬ І УТИЛІЗАЦІЯ РЕАГЕНТА

- Зберігати Гіпохлоритний Концентрат Промивного розчину Diatro-Hypoclean CC при температурі від +4 до +32 °C (°C).
- Термін придатності Diatro-Hypoclean CC становить 18 місяців з дати виготовлення, при зберіганні в заданому температурному діапазоні.
- Не використовувати реагенти після закінчення терміну придатності, зазначеного на етикетці контейнера.
- Викинути відкритий контейнер через 120 днів.
- Не використовувати реагент після заморозування.
- Утилізувати відходи, невикористаний продукт і забруднені упаковки відповідно до місцевих правил утилізації.

У разі будь-яких проблем зверніться до місцевого офіційного дистриб'ютора Diatron для усунення несправностей.



ВИРОБНИК

DIATRON MI Plc.
H-1097 м. Будапешт,
вул. Таблас, 39
Угорщина
Тел.: +36 14369800
Факс: +36 14369809
www.Diatron.com

DIATRON MI Plc.
H-1097 Budapest,
Táblás street, No. 39,
Hungary
Phone: +36 14369800
Fax: +36 14369809
www.Diatron.com



УПОВНОВАЖЕНИЙ ПРЕДСТАВНИК

ТОВ «ДІАМЕБ ТРЕЙД»
вул. Симона Петлюри, 25
м. Івано-Франківськ, 76014
тел.: +38 (0342) 775 122
e-mail: info@diameb.ua
www.diameb.ua

