

НАБІР РЕАГЕНТІВ DIATRO PACK-5 CT (1Л + 0.3Л)

Diatro Pack-5 CT (1L + 0.3L)

Кат. №: **DRP03**

Дата випуску інструкції: **01-07-2016**

Версія **3.4**



Основою при проведенні аналізу є оригінал інструкції англійською мовою, вкладеної в набір. Номер і дата версії оригіналу та перекладу інструкції повинні співпасти.

Diatro-Pack-5 CT

Набір реагентів WBC-5-Diff для автоматизованого аналізу

Код продукту: **DRP03** 1 x пакет

Тільки для діагностики *in vitro*

ПРИЗНАЧЕННЯ ДЛЯ ВИКОРИСТАННЯ

Набір реагентів Diatro-Pack-5 CT WBC-5-Diff - це набір реагентів для строматолізу еритроцитів (RBC), для кількісного визначення лейкоцитів (WBC) та диференціації лейкоцитів у вимірюванні 5 частин (LYM, MONO, NEU, EO, BA) в крові людини на гематологічних аналізаторах Coulter MAXM, HmX, STKS, GEN*S, LH-500, LH-750, LH-780.

Набір реагентів Diatro-Pack-5 CT WBC-5-Diff слід використовувати лише з реактивами Diatron. Помилкові результати можуть бути отримані, якщо реагент застосовувати зі сторонніми реагентами.

Будь ласка, зверніться до Посібника користувача приладу для отримання додаткової інформації.

ІНГРЕДІЄНТИ

Diatro-Erythro CT 1.0 л
Diatro-Stabi CT 0.4 л

ЗАСТЕРЕЖЕННЯ

- Набір реагентів Diatro-Pack-5 CT WBC-5-Diff не шкідливий для навколишнього середовища реагент, що не містить ціаніду та азиду; не містить шкідливих інгредієнтів.
- Уникати контакту з очима, шкірою та одягом.
- У разі потраплення в очі або на шкіру промити очі великою кількістю води протягом декількох хвилин або вимити шкіру водою.
- Зберігати контейнер з реагентом закритим, коли він не використовується.
- Одягти лабораторні рукавички при роботі з реагентом.
- Всі зразки біологічних рідин повинні розглядатися як потенційно інфекційний матеріал. Розглядати всю кров і інші потенційно інфіковані матеріали з відповідними пересторогами. Використовуйте рукавички, маски і халати, якщо передбачається контакт з кров'ю.
- Будь ласка, зверніться до листа безпеки, пов'язаного з реагентом.
- Застосовуйте Апробовані Лабораторні Методи (GLP) при роботі з реагентами.

ЗАБІР І ПІДГОТОВКА ЗРАЗКА

Набір реагентів Diatro-Pack-5 CT WBC-5-Diff призначений для використання із зразками крові, зібраними венепункцією в антикоагулянт ЕДТК. Зразки для гематологічного аналізу можуть зберігатися до 8 годин при температурі 15-30 °C або до 24 годин після збору в холодильнику (2-8 °C).

ПІДГОТОВКА РЕАГЕНТІВ

- Цей реагент готовий до використання і може бути застосований безпосередньо з контейнера; ніякої спеціальної підготовки реагентів не потрібно.
- Залиште реагент при кімнатній температурі протягом не менше 12 годин.

ЗАМІНА РЕАГЕНТУ

- Особа, що встановлює реагент, повинна бути навченим лабораторним працівником.
- Зніміть впускний ковпачок з контейнера реагенту, який повинен бути замінений. Підключіть впускний отвір реагенту до нового контейнера з реагентом.
- Переконайтеся, що кольори на кожній трубці, етикетці контейнера для реагенту та роз'єми на задній панелі приладу збігаються.
- Уникайте забруднення пилом або мікробного забруднення трубопроводу і реагентів. Не зливайте і не змішуйте залишки реагенту з одного контейнера в інший.
- Ретельно праймуйте новий реагент і виміряйте фон відповідно до Інструкції користувача приладу.
- При установці нової партії реагенту, відкалібруйте прилад, як вказано в Інструкції користувача.

ЗБЕРІГАННЯ, СТАБІЛЬНІСТЬ І УТИЛІЗАЦІЯ РЕАГЕНТА

- Зберігати Набір реагентів Diatro-Pack-5 CT WBC-5-Diff при температурі від 15 до 30 °C.
- Термін придатності Diatro-Pack-5 CT WBC-5-Diff становить 24 місяці з дати виготовлення, при зберіганні в заданому температурному діапазоні.
- Не використовуйте реагент після закінчення терміну придатності, зазначеного на етикетці контейнера.
- Утилізуйте відкритий контейнер через 120 днів.
- Не використовуйте реагент після заморожування.
- Утилізуйте відходи, невикористаний продукт і забруднені упаковки відповідно до місцевих правил утилізації.



ВИРОБНИК

ДІАТРОН МІ РЛс
вул. Таблас, 39
Н-1097 Будапешт, Угорщина
Тел.: +36 14369800
Факс: +36 14369809
www.diatron.com



УПОВНОВАЖЕНИЙ ПРЕДСТАВНИК

ТОВ «ДІАМЕВ ТРЕЙД»
вул. Симона Петлюри, 25
м. Івано-Франківськ, 76014
тел.: +38 (0342) 775 122
факс: +38 (0342) 775 123
e-mail: info@diameb.ua
www.diameb.ua

