

КАЛІБРАТОР ДЛЯ ХОЛЕСТЕРИНУ ЛпВГ

HDL-Cholesterol Calibrator

Каталог. №: **F03710SV**

Дата випуску інструкції: **2015/07/02**
Версія **02**



Основною при проведенні аналізу є оригінал інструкції англійською мовою, вкладеної в набір. Номер і дата версії оригіналу та перекладу інструкції повинні співпадати.

Ліофілізований калібратор людського походження для використання в тестах з метою кількісного in-vitro визначення ліпопротеїнів високої щільності Холестерину (HDL-C) на фотометричних системах

Кат. №: **Вміст:**
F03710SV **1 x 3 мл** Одиничний флакон
F03710SVV **1 x 3 мл** Не мічений одиничний флакон (OEM)

Додатково пропонуються:
F03100 5 x 100 мл HDL-C DIRECT Реагент
F03115 5 x 50 мл HDL-C DIRECT Реагент

СКЛАД КАЛІБРАТОРА

HDL-холестерин в матриці на основі людської сироватки
нереактивні стабілізатори
консерванти

ПІДГОТОВКА КАЛІБРАТОРА

- Відкрити флакон дуже обережно, уникаючи втрати ліофілізованого матеріалу.
- Додати точно 3 мл дистильованої води (неточне відновлення контролю і помилка в методиці проведення аналізу можуть привести до помилкових результатів).
- Закрити флакон ретельно і дати настоятися протягом 30 хвилин.
- Повністю розчинити вміст обережними періодичними перемішуваннями, уникаючи утворення піни.
- Не трясіть!

ЗБЕРІГАННЯ І СТАБІЛЬНІСТЬ КАЛІБРАТОРА

Зберігання: При 2 - 8 °C
Стабільність: до закінчення терміну придатності
Стабільність після відновлення:
7 днів при температурі 2 - 10 °C
30 днів при температурі -20 °C
ЗАКРИВАТИ НЕГАЙНО ПІСЛЯ ВИКОРИСТАННЯ!
ЗАМОРОЖУВАТИ ТІЛЬКИ ОДИН РАЗ!

Не використовуйте продукт, якщо є видимі ознаки росту мікробів у флаконі.
Неправильна обробка і/або зберігання калібратора можуть вплинути на результати.

ПОПЕРЕДЖЕННЯ ТА ЗАСТЕРЕЖЕННЯ

- Увага.
H317: може викликати алергічну реакцію шкіри.
P261: Уникайте вдихання пилу/диму/газу/туману/випаровувань/аерозолів.
P280: Одягайте захисні рукавиці/захисний одяг/захист для очей/захист для обличчя.
P303+P361+P353: При попаданні на шкіру (або волосся): негайно зніміть увесь забруднений одяг. Промити шкіру водою/під душем.
P333+P313: при подразненні шкіри або висипі: зверніться до лікаря.
- Кожна донорська одиниця, яка використана у виробництві DIALAB HDL калібратора була протестована на HbsAg, анти-HCV та анти-VІL 1 і VІL 2, за допомогою необхідних тестів FDA. Оскільки тестовий метод не може гарантувати, що продукти, отримані з крові людини, не містять вірусу VІL-1/2 та гепатиту В та вірусу гепатиту С, то цей матеріал та всі зразки пацієнта повинні оброблятися так, ніби вони можуть передавати інфекційні захворювання.

КАЛІБРУВАЛЬНІ ДАНІ КОНКРЕТНОГО ЛОТУ

	HDL-Холестерин
Значення	55.5 мг/дл
ЛОТ:	TN176
Термін придатності:	2018-10

Дані значення калібратора, отримані з використанням реагентів DIALAB HDL-Cholesterol прямий.

ПОВОДЖЕННЯ З ВІДХОДАМИ

Будь ласка, дотримуйтесь місцевих вимог.



ВИРОБНИК

Діалаб ГмБХ
Виробництво та продаж хіміко-технічної продукції та лабораторних приладів в ІЗ НОЕ-Зюд, Хондаштрассе, Обдъект М55, 2351
Вінер-Нойддорф
Тел.: +43 (0) 2236 660910-0,
Факс: +43 (0) 2236 660910-30,
e-mail: office@dialab.at



УПОВНОВАЖЕНИЙ ПРЕДСТАВНИК

ТОВ «ДІАМЕБ ТРЕЙД»
вул. Симона Петлюри, 25
м. Івано-Франківськ, 76014
тел.: +38 (0342) 775 122
факс: +38 (0342) 775 123
e-mail: info@diameb.ua
www.diameb.ua

