

## КАЛІБРАТОР ДЛЯ ХОЛЕСТЕРИНУ ЛпНГ

### LDL-Cholesterol Calibrator

Кат. №: **F03711SV**

Дата випуску інструкції: **30-09-2019**  
Версія **03**



Основною при проведенні аналізу є оригінал інструкції англійською мовою, вкладеної в набір. Номер і дата версії оригіналу і перекладу інструкції повинні збігатися.

**Кат. №**            **Склад:**  
**F03711SV**        **1 x 1 мл**        Одиночний флакон  
**F03711VSV**      **1 x 1 мл**        Немічений одиночний флакон (ОЕМ)

Додатково пропонуються:

F05365        5 x 50 мл        Chol. LDL Direct Peагент  
F05367        5 x 10 мл        Chol. LDL Direct Peагент

#### КОМПОЗИЦІЯ КАЛІБРАТОРА

LDL-C в матриці на основі людської сироватки  
нереактивні стабілізатори  
консерванти

#### ПІДГОТОВКА КАЛІБРАТОРА

1. Відкрити флакон дуже обережно, уникаючи втрати ліофілізованого матеріалу.
2. Додати 1 мл дистильованої води (неточне відновлення контролю і помилка в методиці проведення аналізу можуть привести до помилкових результатів).
3. Закрити флакон ретельно і дати настоятися протягом 30 хвилин.
4. Повністю розчинити вміст періодичним обережним перемішуванням, уникаючи утворення піни.
5. Не трясти!

#### СТАБІЛЬНІСТЬ І ЗБЕРІГАННЯ КАЛІБРАТОРА

Зберігання:            При температурі 2-8 °С  
Стабільність:        До закінчення терміну придатності

Стабільність після відновлення:

1 день                при 18-25 °С  
7 днів                при 2 - 8°С  
30 днів                при -20 °С

**ЗАКРИТИ НЕГАЙНО ПІСЛЯ ВИКОРИСТАННЯ.**

**ЗАМОРОЖУВАТИ ТІЛЬКИ ОДИН РАЗ!**

Не використовуйте продукт, якщо є видимі ознаки росту мікробів у флаконі.

Якщо неправильно поводитися і/або зберігати калібратор, це може вплинути на результати.

#### ПОПЕРЕДЖЕННЯ І ЗАХОДИ БЕЗПЕКИ

1. Кожен зразок донорської крові, призначений для використання у виробництві Dialab LDL калібратора, був протестований на HbsAg, анти-HGV і анти-ВІЛ 1 та ВІЛ 2, відповідними FDA випробуваннями. Оскільки, жоден тест не може гарантувати, що продукти, отримані з крові людини, не містять вірус ВІЛ-1/2 і гепатит В і гепатит С, цей матеріал, і всі зразки пацієнтів слід вважати такими, що можуть передавати інфекційні захворювання.

#### ДАНІ АНАЛІЗУ, ХАРАКТЕРНІ ДЛЯ ПАРТІЇ

	Калібратор для холестерину ЛпНГ
Значення:	<b>101.16 мг/дл</b>
Партія:	<b>290590</b>
Термін придатності:	<b>2022-09-30</b>

Надане значення калібратора визначається за допомогою прямого реагенту DIALAB LDL-холестерину.

#### УПРАВЛІННЯ ВІДХОДАМИ

Посилатися на місцеві вимоги щодо утилізації відходів.



#### ВИРОБНИК

Діалаб ГмбХ  
Виробництво та продаж хіміко-технічної  
продукції та лабораторних приладів в ІЗ  
НОЕ-Зюд, Хондаштрассе, Обдъект М55, 2351  
Вінер-Нойдорф  
Тел.: +43 (0) 2236 660910-0,  
Факс: +43 (0) 2236 660910-30,  
e-mail: [office@dialab.at](mailto:office@dialab.at)



#### УПОВНОВАЖЕНИЙ ПРЕДСТАВНИК

ТОВ «ДІАМЕБ ТРЕЙД»  
вул. Симона Петлюри, 25  
м. Івано-Франківськ, 76014  
тел.: +38 (0342) 775 122  
факс: +38 (0342) 775 123  
e-mail: [info@diameb.ua](mailto:info@diameb.ua)  
[www.diameb.ua](http://www.diameb.ua)

