

**КАЛІБРАТОР  
ДЛЯ КІЛЬКІСНОГО IN VITRO ВИЗНАЧЕННЯ  
ХОЛЕСТЕРИНУ ЛІПОПРОТЕЇНУ НИЗЬКОЇ  
ГУСТИНИ (LDL-C) НА ФОТОМЕТРИЧНИХ  
СИСТЕМАХ  
(Калібратор ЛпНГ)**

**УПРАВЛІННЯ ВІДХОДАМИ**

Посилатися на місцеві вимоги щодо утилізації відходів.



**УПОВНОВАЖЕНИЙ ПРЕДСТАВНИК**

ТОВ «ДІАМЕБ»  
вул.Чорновола, 97  
м. Івано-Франківськ, 76005  
тел.: +38 (0342) 775 122  
факс: +38 (0342) 775 123  
e-mail: [info@diameb.ua](mailto:info@diameb.ua)  
[www.diameb.com](http://www.diameb.com)

Кат. № : F03711VSV      Методика від 30-09-2019  
Виробник : Dialab (Австрія)      Версія 03



Основною при проведенні аналізу є оригінал інструкції  
англійською мовою, вкладеної в набір. Номер і дата версії  
оригіналу і перекладу інструкції повинні збігатися.

**Кат. №**      **Склад:**  
**F03711SV**      **1 x 1 мл**      Одиничний флакон  
**F03711VSV**      **1 x 1 мл**      Немічений одиничний флакон (ОЕМ)

Додатково пропонуються:

F05365      5 x 50 мл      Chol. LDL Direct Reagent  
F05367      5 x 10 мл      Chol. LDL Direct Reagent

**КОМПОЗИЦІЯ КАЛІБРАТОРА**

LDL-C в матриці на основі людської сироватки  
нереактивні стабілізатори  
консерванти

**ПІДГОТОВКА КАЛІБРАТОРА**

1. Відкрити флакон дуже обережно, уникаючи втрати ліофілизованого матеріалу.
2. Додати 1 мл дистильованої води (неточне відновлення контролю і помилка в методиці проведення аналізу можуть привести до помилкових результатів).
3. Закрити флакон ретельно і дати настоятися протягом 30 хвилин.
4. Повністю розчинити вміст періодичним обережним перемішуванням, уникаючи утворення піни.
5. Не трясати!

**СТАБІЛЬНІСТЬ І ЗБЕРІГАННЯ КАЛІБРАТОРА**

Зберігання:      При температурі 2-8 °C  
Стабільність:      До закінчення терміну придатності

Стабільність після відновлення:

1 день      при 18-25 °C  
7 днів      при 2 - 8 °C  
30 днів      при -20 °C

ЗАКРИТИ НЕГАЙНО ПІСЛЯ ВИКОРИСТАННЯ.

ЗАМОРОЖУВАТИ ТІЛЬКИ ОДИН РАЗ!

Не використовуйте продукт, якщо є видимі ознаки росту мікробів у флаконі.

Якщо неправильно поводитися і/або зберігати калібратор, це може вплинути на результати.

**ПОПЕРЕДЖЕННЯ І ЗАХОДИ БЕЗПЕКИ**

1. Кожен зразок донорської крові, призначений для використання у виробництві Dialab LDL калібратора, був протестований на HbsAg, анти-HGV і анти-ВІЛ 1 та ВІЛ 2, відповідними FDA випробуваннями. Оскільки, жоден тест не може гарантувати, що продукти, отримані з крові людини, не містять вірус ВІЛ-1/2 і гепатит В і гепатит С, цей матеріал, і всі зразки пацієнтів слід вважати такими, що можуть передавати інфекційні захворювання.

**ДАНІ АНАЛІЗУ, ХАРАКТЕРНІ ДЛЯ ПАРТІЇ**

	<b>LDL-Cholesterol</b>
Значення:	<b>101.16 мг/дл</b>
Партія:	<b>290590</b>
Термін придатності:	<b>2022-09-30</b>

Надане значення калібратора визначається за допомогою прямого реагенту DIALAB LDL-холестерину.

© Переклад на українську мову ТОВ «ДІАМЕБ»

