

ДЛЯ ШВИДКОГО ВИЗНАЧЕННЯ АНТИТИЛ IgG/IgM ДО КРАСНУХИ

Кат. № : **F63-2SP**
 Форма : **касета**

Упаковка: **40 тестів**
 Дата випуску інструкції: **10-02-2017**

Тільки для використання in vitro діагностиці

ПРИЗНАЧЕННЯ ВИКОРИСТАННЯ

Тест-касета для швидкого визначення антитіл IgG/IgM до краснухи (сироватка/плазма) - це швидкий хроматографічний латеральний імуноаналіз для якісного виявлення антитіл IgG та IgM до краснухи в сироватці або плазмі.

РЕЗЮМЕ

Вірус краснухи є членом сім'ї Тога вірусів, які, в основному, виявляються у людей. Як правило, краснуха вважається хворобою підлітків середньої важкості. Однак материнська інфекція може передаватися через плаценту до плоду, викликаючи вроджену краснуху. Первинна інфекція під час ранньої вагітності може мати важкі наслідки, такі як тяжке ушкодження плоду, мертвородження або переривання вагітності. У дітей, народжених без симптомів, можуть розвинути ці порушення в подальшому житті. Широко поширена вакцинація значно знизила частоту захворювання на краснуху у всіх вікових групах. Проте, від 10 до 20% молодих людей все ще виявляються чутливими до вірусу. Щоб зменшити ризик серйозних ускладнень, необхідно застосувати точні серологічні методи визначення серологічного статусу дитородних жінок.

Тест-касета для швидкого визначення антитіл IgG/IgM до краснухи (сироватка/плазма) - це швидкий хроматографічний імунологічний аналіз для якісного визначення антитіл IgG та IgM до вірусу краснухи в сироватці або плазмі.

ПРИНЦИП

Тест-касета для швидкого визначення антитіл IgG/IgM до краснухи (сироватка/плазма) є якісним латеральним імуноаналізом для виявлення антитіл IgG та IgM до краснухи в зразках сироватки або плазми. У цьому тесті мишачий анти-IgG людини та мишачий анти-IgM людини нанесені в області тестових ліній. Під час тестування зразки сироватки або плазми реагують з антигеном краснухи на тест-касеті. Суміш потім переміщується вгору по мембрані під капілярною дією і реагує з мишачим анти-IgG людини або козячим анти-IgM людини на мембрані в області тестової лінії. Наявність кольорової лінії в області тестової лінії вказує на позитивний результат для інфекції краснухи, тоді як її відсутність свідчить про негативний результат для цієї інфекції.

В якості процедурного контролю кольорова лінія завжди з'являється в області контрольної лінії, що вказує на те, що був доданий відповідний об'єм зразка та відбулось зволоження мембрани.

РЕАГЕНТИ

Тест-касета містить мишачі анти-IgG/IgM людини та антиген краснухи. Козячий анти-IgG миші застосовується на контрольній лінії.

ЗАСТЕРЕЖЕННЯ

- Тільки для професійного застосування в *in vitro* діагностиці. Не використовувати після закінчення терміну придатності.
- Перед виконанням тесту слід повністю ознайомитися з цією інструкцією.
- Тест повинен залишатися у закритому пакеті до початку використання.
- Перед використанням привести всі реагенти до кімнатної температури (15-30 °C (°C)).
- Належним чином поводьтеся зі зразками і тест-пристроями, що були використані, а саме так, ніби вони здатні потенційно інфікувати. Утилізуйте всі зразки і використані пристрої в належному контейнері для біонебезпечних матеріалів. При обробці та утилізації небезпечних матеріалів слідуйте місцевим, національним або регіональним нормативним актам.
- Одягайте одноразові рукавички, халат та захисні окуляри під час обробки потенційно інфікованого матеріалу та виконання аналізу. Після цього ретельно вимийте руки.
- Недотримання температурного режиму може негативно вплинути на отримані результати.
- Не їсти, не пити і не палити в місцях, де працюють зі зразками і наборами.

- При розливанні зразків на будь-які поверхні потрібно ретельно прибрати, використовуючи відповідний дезінфікуючий засіб.
- Зберігати в недоступному для дітей місці.

ЗБЕРІГАННЯ ТА СТАБІЛЬНІСТЬ

Зберігати набір при кімнатній температурі або в холодильнику (2-30 °C (°C)). Тест стабільний протягом усього терміну придатності, зазначеного на герметичній упаковці. Тест повинен залишатися в цьому мішечку до використання. **НЕ ЗАМОРОЖУВАТИ.** Не використовувати після закінчення терміну придатності.

ЗБІР І ПІДГОТОВКА ЗРАЗКІВ

- Тест-касету для швидкого визначення антитіл IgG/IgM до краснухи (сироватка/плазма) можна застосовувати зі зразками сироватки або плазми.
- Якнайшвидше відокремити сироватку або плазму від крові, щоб уникнути гемолізу. Можна використовувати лише прозорі, не гемолізовані зразки.
- Тестування слід проводити відразу ж після збору зразків. Не залишайте зразки при кімнатній температурі протягом тривалого періоду часу. Зразки можуть зберігатися при 2-8 °C (°C) протягом до 3 днів. Для тривалого зберігання зразки повинні зберігатися нижче -20 °C (°C).
- Перед тестуванням доведіть зразки до кімнатної температури. Замерзлі зразки повинні бути повністю розморожені та добре перемішані перед тестуванням. Зразки не слід заморожувати та відтавати неодноразово.
- Якщо зразки повинні бути транспортовані, вони повинні бути упаковані відповідно до місцевих правил для транспортування етіологічних агентів.

МАТЕРІАЛИ
Матеріали, які постачаються з набором

- Тест-касеті
- Буфер
- Піпетки для зразків
- Інструкція

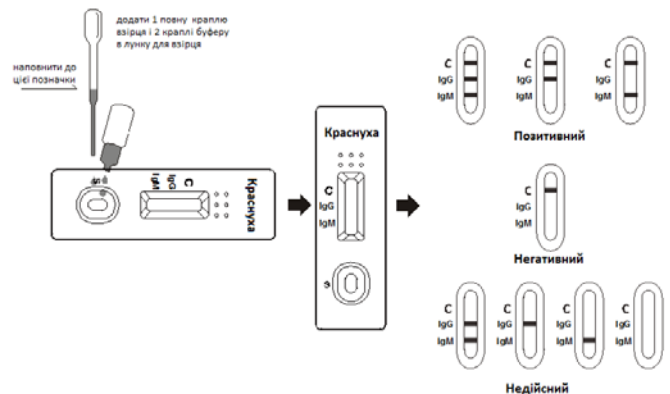
Необхідні матеріали, але не надані

- Контейнери для збору зразків
- Центрифуга (тільки для плазми)
- Таймер

ПРОЦЕДУРА АНАЛІЗУ

До початку тестування дозволити тест-касеті, зразку, буферу і/або контролюю досягти кімнатної температури (15-30 °C (°C)).

- Витягніть тест-касету з герметичної упаковки та використайте її протягом однієї години. Найкращі результати будуть отримані, якщо аналіз проводиться відразу ж після відкриття упаковки з фольги.
- Поставте тест-касету на чисту та рівну поверхню. Тримайте піпетку вертикально; наберіть зразок приблизно **на 1 см (см) над** верхнім кінцем наконечника, як показано на малюнку нижче. Перемістіть 1 повну краплю (**приблизно 20 мкл (μl)**) зразка у кожен лунку для зразка, потім додайте 2 краплі буфера (приблизно 80 мкл (μl)) до кожної лунки зі зразком і запустіть таймер. Див ілюстрацію нижче.
- Почекайте, поки не з'явиться кольорова лінія (ї). Результат тесту слід зчитати через 15 хвилин. Не інтерпретуйте результат через 20 хвилин.


ІНТЕРПРЕТАЦІЯ РЕЗУЛЬТАТІВ

(Будь ласка, зверніться до ілюстрації вище)

ПОЗИТИВНИЙ:* З'являються дві або три лінії. Одна кольорова лінія завжди повинна бути в зоні контрольної області (C) і ще одна або дві лінії повинні бути в зоні тестової області (IgG та/або IgM).

IgM Позитивний: Одна кольорова лінія має бути в області контрольної лінії (C). Інша лінія з'являється в IgM області. Це вказує на позитивний результат тесту на антитіла IgM до краснухи.

IgG Позитивний: Одна кольорова лінія має бути в області контрольної лінії (C), інша лінія з'являється в IgG області. Це вказує на позитивний результат тесту на IgG антитіла до краснухи.

***ПРИМІТКА:** Інтенсивність кольору в ділянках тестової лінії (IgM і IgG) може змінюватися залежно від концентрації антитіл до краснухи, присутніх у зразку. Тому будь-який відтінок кольору в області тестової лінії (IgM та/або IgG) слід вважати позитивним.

НЕГАТИВНИЙ: В області контрольної лінії (C) з'являється одна кольорова лінія. В тестовій області не з'являється жодної лінії (IgG та IgM).

НЕДІЙСНИЙ: Контрольна лінія не з'являється. Недостатній об'єм зразка або неправильна методика процедури тесту є найбільш ймовірними причинами не появи контрольної лінії. Переглянути процедуру і повторити тест з використанням нової тест-касети. Якщо це не дає бажаного результату, слід припинити використання тестового набору негайно і зв'язатися з регіональним дистриб'ютором.

КОНТРОЛЬ ЯКОСТІ

Внутрішні процедурні контролю включені в тест. Кольорова лінія, що з'являється в області контрольної лінії (C), є внутрішнім процедурним контролем. Вона підтверджує додавання належної кількості зразка і коректність проведення процедури.

ОБМЕЖЕННЯ ПРОЦЕДУРИ

1. Тест-касети для швидкого визначення антитіл IgG/IgM до краснухи (сироватка/плазма) призначена тільки для діагностики *in vitro*. Цей тест повинен використовуватися для виявлення антитіл IgG та IgM до краснухи у зразках сироватки або плазми. Ні кількісне значення, ні швидкість збільшення концентрації антитіл IgG та IgM до краснухи не можуть бути визначені цим якісним тестом.
2. Тест-касети для швидкого визначення антитіл IgG/IgM до краснухи (сироватка/плазма) лише вказує на наявність IgG або IgM антитіл до краснухи у зразку та не повинна використовуватися як єдиний критерій для діагностики інфекцій, пов'язаних з краснухою.
3. Як і у всіх діагностичних тестах, всі результати повинні бути розглянуті з іншою клінічною інформацією, доступною для лікаря.
4. Якщо результат тесту є негативним і клінічні симптоми зберігаються, рекомендується провести додаткове спостереження за іншими клінічними методами. Негативний результат у будь-який час не виключає можливості інфекції краснухи.

ОЧІКУВАНІ РЕЗУЛЬТАТИ

Тест-касети для швидкого визначення антитіл IgG/IgM до краснухи (сироватка/плазма) порівнювалась з провідними комерційними ІФА тестами на краснуху. Кореляція між цими тестами становить понад 97.7%.

РОБОЧІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Чутливість і специфічність

Тест-касети для швидкого визначення антитіл IgG/IgM до краснухи (сироватка/плазма) порівнювалась з провідними комерційними ІФА тестами на краснуху; результати показують, що Тест-касети для швидкого визначення антитіл IgG/IgM до краснухи (сироватка/плазма) має високу чутливість та специфічність.

Метод	Краснуха ІФА (IgM)		Загальні результати	
	Результати	Позитивний		Негативний
Тест-касети для швидкого визначення антитіл IgG/IgM до краснухи (сироватка/плазма) для IgM	Позитивний	33	3	36
	Негативний	2	262	264
Загальні результати		35	265	300

Відносна Чутливість: 94.3% (95%CI*: 80.8%-99.3%);

Відносна Специфічність: 98.9% (95%CI*: 96.7%-99.8%);

Достовірність: 98.3% (95%CI*: 96.2%-99.5%).

*Довірчий Інтервал

Метод	Краснуха ІФА (IgG)		Загальні результати	
	Результати	Позитивний		Негативний
Тест-касети для швидкого визначення антитіл IgG/IgM до краснухи (сироватка/плазма) для IgG	Позитивний	32	4	36
	Негативний	3	261	264
Загальні результати		35	265	300

Відносна Чутливість: 91.4% (95%CI*: 76.9%-98.2%);

Відносна Специфічність: 98.5% (95%CI*: 96.2%-99.6%);

Достовірність: 97.7% (95%CI*: 95.3%-99.1%).

*Довірчий Інтервал

Точність В аналізі

Точність в аналізі визначалась за допомогою 10 дублікатів 3 різних зразків: негативного, низько позитивного та високо позитивного. Негативні, високо позитивні та низько позитивні значення були правильно визначені у > 99% випадків.

Між аналізами

Точність між аналізами визначалась 10 незалежними аналізами на тих же трьох різних зразках: негативному, високо позитивному та низько позитивному. Три різні партії Експрес-касети були протестовані протягом 10 днів, використовуючи вище зазначені зразки. Зразки були правильно ідентифіковані у > 99% випадків.

Перехресна реактивність

Тест-касети для швидкого визначення антитіл IgG/IgM до краснухи (сироватка/плазма) була протестована на позитивні зразки HAV, HBV, HCV, ВІЛ, RF, сифіліс, H. Pylori, CMV, TOXO, HSV 1/2. Результати не показали перехресної реактивності.

Інтерферуючі речовини

Наступні сполуки також були випробувані з даним тестом і не було виявлено інтерференції.

Ацетамінофен: 20 мг/дл (mg/dl)	Кофеїн: 20 мг/дл (mg/dl)	ЕДТА: 20 мг/дл (mg/dl)
Ацетилсаліцилова кислота: 20 мг/дл (mg/dl)	Гентизінова кислота: 20 мг/дл (mg/dl)	Етанол: 10%
Аскорбінова кислота: 2 г/дл (g/dl)	Фенілпропаноламін: 20 мг/дл (mg/dl)	Глюкоза: 20 мг/дл (mg/dl)
Білірубін: 1000 мг/дл (mg/dl)	Саліцилова кислота: 20 мг/дл (mg/dl)	Фенотіазин: 20 мг/дл (mg/dl)

Умовні позначення

	Увага, дивіться інструкції по застосуванню		Тестів в наборі		Не використовувати повторно
	Тільки для in vitro діагностики		Використати до		Кат. №
	Зберігати між 2-30 °C (°C)		№ партії		Зверніться до інструкції з використання
	Не використовуйте, якщо пакет пошкоджений		Виробник		



ВИРОБНИК:

ТОВ «ЛАБЮЕЙ»

Україна, 76018

м. Івано-Франківськ, вул. Петлюри, 25

Моб.: +38 (067) 000-20-22

E-mail: info@labua.com.ua



UA.TR.116