

ОЧИЩУВАЧ ЗОНДА ДЛЯ З-ДІФФ (50 МЛ)

Probe Cleanser for 3-part (50 ml)

Кат. №: P04.03.101108-00

Версія A/0



Основною при проведенні аналізу є оригінал інструкції англійською мовою, вкладеної в набір. Номер і дата версії оригіналу та перекладу інструкції повинні співпадати.

Назва продукту

Очищувач зонда для аналізу клітин крові.

Тип продукту

Очищувач зонда

Пакування

Специфікація: 50 мл

Кат. №: 22005005

Призначення використання

Цей продукт може регулярно видаляти залишки клітин, білків крові в приладі, щоб запобігти осіданню білка в голці для відбору зразків, трубки, лічильної камери та продовжити термін експлуатації приладу та забезпечити точність тесту.

Принцип тестування

Цей продукт є високоефективним окислювачем та дезінфікуючим засобом, який може швидко видалити залишки та бактерії з системи виявлення.

Основні компоненти

Гіпохлорит натрію, гідроксид натрію.

Зберігання та транспортування

Якщо зберігати при температурі 2-30 °C, стабільність закритого флакона становить 2 роки. Якщо зберігається при 15-30 °C, стабільність відкритого флакона становить 30 днів.

Застосовувані прилади

Застосовується з Автоматичним гематологічним аналізатором З-діфф серії КТ виробництва Genrui Biotech Inc.

Використовуваний метод

Будь ласка, зверніться до інструкції з конкретного використання інструменту.

Показники ефективності

Цей продукт повинен бути безбарвною прозорою рідиною, без осадів, гранул або флокул.

Значення бланка: WBC $\leq 0,2 \times 10^9$ /л, RBC $\leq 0,02 \times 10^{12}$ /л, HGB ≤ 1 г/л, PLT $\leq 10 \times 10^9$ /л.

Увага

1. Не ковтайте при потрапленні в рот. Уникайте контакту зі шкіркою, після контакту негайно вимийте великою кількістю води та негайно зверніться до лікаря.
2. Не використовуйте після закінчення терміну придатності.
3. Якщо спостерігається явище замерзання, розморозте при кімнатній температурі, добре перемішайте, переконайтеся, що значення бланка входить в межі вимог до приладу.
4. Утилізуйте відходи та залишки реагентів відповідно до місцевих норм та відповідних екологічних вимог.

Наступні фактори впливатимуть на тести:

1. Термін придатності реагентів закінчився.
2. Реагенти забруднюються пилом з повітря.
3. Зразки не оброблялися в чистому середовищі.
4. Змішані або комбіновані з реагентами інших виробників.

Графічні символи

Етикетка	Значення
	Дата виробництва
	Виробник
	Біонебезпека
	Діагностичний реагент In Vitro
	№ лоту
	Температурний режим
	Термін придатності
	Уповноважений представник у Європейському союзі
	Об'єм
	Зверніться до Інструкції по застосуванню
	Не використовувати повторно
	Не піддавати впливу сонячних променів
	Містить достатньо для <n> тестів
	Кат. №
	CONFORMITE EUROPEENNE

Дата затвердження та перегляду інструкції

Дата затвердження: 12 травня 2018 року

Дата перегляду: немає даних.

Гарантія та технічна підтримка

Якщо повторюється повідомлення про невідні результати або вам потрібна технічна підтримка, зверніться до Центру обслуговування та підтримки користувачів Genrui.



ВИРОБНИК

ГЕНРУІ БІОТЕК ІНК.

4-10F, Будинок 3, Технологічний Парк Гея

Район Гуанмін, 518106

Шеньчжень, Китай

Тел.: + 86-755-26835560

Факс: + 86-755-26678789

e-mail: info@genrui-bio.com

Веб: www.genrui-bio.com



УПОВНОВАЖЕНИЙ ПРЕДСТАВНИК

ТОВ «Діамеб»

вул. Чорновола, 97

м. Івано-Франківськ, 76005

тел.: +38 (0342) 775 122

факс: +38 (0342) 775 123

e-mail: info@diameb.ua

www.diameb.ua

