

DS-ISE ЗАПОВНЮЮЧИЙ РОЗЧИН ДЛЯ GE300 (10 МЛ)

DS-ISE Filling Solution for GE300 (10 ml)

Кат. №: P14.03.105011-00

Дата випуску інструкції: 19-10-2018
Версія A/7



Основою при проведенні аналізу є оригінал інструкції англійською мовою, вкладеної в набір. Номер і дата версії оригіналу та перекладу інструкції повинні співпадати.

Назва продукту

DS-ISE ISE Заповнюючий Розчин.

Пакування

10 мл/флакон

Кат. №: 42045001

Призначення використання

Застосовується як розчин для заповнення іонних електродів (K^+ , Na^+ , Cl^- , Ca^{2+} , Li^+ , pH).

Принцип тестування

Не застосовується.

Основні компоненти

KCl 0,04%,
NaCl 0,6%,
CaCl₂ 0,033%,
регулятор pH
консервант

Зберігання та транспортування

Стабільний протягом 2 років при зберіганні при 2-30 °C в тіні. Продукт слід транспортувати із зовнішньою упаковкою.

Застосовувані прилади

Аналізатори електролітів.

Вимоги до зразка

Не застосовується.

Методи тестування

Залити ISE. Заповнюючий Розчин в іонний електрод. Для додаткових операцій з приладом зверніться до посібника з експлуатації електролітного аналізатора.

Референсний діапазон

Не застосовується.

Інтерпретація результатів тесту

Не застосовується.

Калібрування та КЯ

Не застосовується.

Обмеження методів тестування

Не застосовується.

Індикатор продуктивності

Не застосовується.

Заходи безпеки

1. Будь ласка, герметизуйте продукт належним чином після використання, щоб уникнути тривалого впливу повітря.
2. Уникайте потрапляння на шкіру. У роботі користуйтеся рукавичками.
3. Якщо реагент необережно розбризкується на шкіру, очі тощо, негайно змийте чистою водою, а якщо помилково проковтнете, зверніться до лікаря.

4. Найкращий об'єм розчину для нормальної роботи - 2/3 рівня внутрішнього об'єму.
5. Не використовуйте розчин при пошкодженні упаковки.

Графічні символи

Етикетка	Значення
	Дата виробництва
	Діагностичний реагент In Vitro
	Виробник
	Біонебезпека
	№ лоту
	Температурний режим
	Термін придатності
	Уповноважений представник у Європейському союзі
	Кат. №
	CONFORMITE EUROPEENNE
	Об'єм
	Основний компонент

Інформація про навчання

Будь ласка, зверніться до навчального посібника.

Довідкова інформація

Якщо вам потрібна допомога, зв'яжіться з відділом післяпродажного обслуговування.

Вирішення проблем

Будь ласка, зв'яжіться з відділом післяпродажного обслуговування.

Список літератури

Не застосовується.

Номер дозволу на виробництво медичних пристроїв

GuangDong SFDA (Державна адміністрація харчових продуктів та лікарських засобів) отримав дозвіл на виробництво медичних пристроїв № 20041046.

Гарантія та технічна підтримка

Якщо повторюється повідомлення про недейсні результати або вам потрібна технічна підтримка, зверніться до Центру обслуговування та підтримки користувачів Gen Rui.

Дата затвердження та перегляду інструкції

Дата затвердження: 06 Листопада 2015 року

Дата перегляду: 19 Жовтня 2018 року.



ВИРОБНИК

ГЕНРУІ БІОТЕК ІНК.
4-10F, Будинок 3, Технологічний Парк Гея
Район Гуанмін, 518106
Шеньчжень, Китай
Тел.: + 86-755-26835560
Факс: + 86-755-26678789
e-mail: info@genrui-bio.com
Веб: www.genrui-bio.com



УПОВНОВАЖЕНИЙ ПРЕДСТАВНИК

ТОВ «ДІАМЕБ»
вул. Чорновола, 97
м. Івано-Франківськ, 76005
тел.: +38 (0342) 775 122
факс: +38 (0342) 775 123
e-mail: info@diameb.ua
www.diameb.ua

