

IgG-РФ-СОРБЕНТ (ГОТОВИЙ ДО ВИКОРИСТАННЯ)

RF-SORBENT-SD-100

Кат. №: **RF-SORBENT-SD-100**

Дата випуску інструкції: **04-03-2019**
Версія **3.0**



Основною при проведенні аналізу є оригінал інструкції англійською мовою, вкладеної в набір. Номер і дата версії оригіналу і перекладу інструкції повинні збігатися.

НАЗВА ПРОДУКТУ

IgG-РФ-Сорбент (готовий до використання)
Використовувати тільки для діагностики *in vitro*.

Кат. №: RF-SORBENT-SD -100

Об'єм: 100 мл

Зберігання: 2 °C – 8 °C

ОПИС

DRG IgG-RF-сорбент (готовий до застосування) може бути використаний з ELISA-тестами IgA або IgM для інфекційних захворювань від DRG для ручної роботи, особливо якщо потрібно автоматичне виконання аналізу. Щоб уникнути інтерференції специфічних IgG і ревматоїдних факторів, сироватки пацієнта повинні розглядатися за допомогою РФ-абсорбенту.

УВАГА:

Якщо використовуєте DRG IgG-РФ-сорбент (готовий до використання), реагенти *Розчинник зразків* та *IgG-РФ-Сорбент*, що регулярно входять до комплекту, **не повинні використовуватися.**

РОЗВЕДЕННЯ ЗРАЗКА

Розведення зразка, описане в розділі 5.3 «Розведення зразка» інструкцій для застосування, включених до набору ІФА Інфекційних захворювань IgA або IgM, слід змінити на наступну процедуру:

1. Перед тестуванням, розведіть кожний зразок пацієнта **1+100** з *IgG-РФ-Сорбентом (готовим до використання)*;
Напр. 10 мкл зразка + 1 мл *IgG-РФ-Сорбенту (готового до використання)* **добре перемішати.**
2. **Витримати при кімнатній температурі не менше 15 хвилин, максимально до 2 годин і знову добре перемішати.**

Візьміть 100 мкл попередньо оброблених зразків для ІФА.



ВИРОБНИК

DRG Інструментс ГмбХ
вул. Фраунберг 18, 35039
м. Марбург, Німеччина
Тел: +49(0)64 21/170 00
Факс: +49(0)64 21/17 00 50
www.drg-diagnostics.de
e-mail: drq@drq-diagnostics.de



УПОВНОВАЖЕНИЙ ПРЕДСТАВНИК

ТОВ «ДІАМЕБ ТРЕЙД»
вул. Симона Петлюри, 25
м. Івано-Франківськ, 76014
тел.: +38 (0342) 775 122
факс: +38 (0342) 775 123
e-mail: info@diameb.ua
www.diameb.ua

