

# IgG-РФ-СОРБЕНТ (КОНЦЕНТРАТ)

## RF-SORBENT/RF-SORBENT-20

Кат. №: **RF-SORBENT/RF-SORBENT-20**

Дата випуску інструкції: **04-03-2019**  
Версія **2.0**



Основною при проведенні аналізу є оригінал інструкції англійською мовою, вкладеної в набір. Номер і дата версії оригіналу і перекладу інструкції повинні збігатися.

### НАЗВА ПРОДУКТУ

IgG-РФ-Сорбент (концентрат)

Використовувати тільки для діагностики in vitro.

Кат. №: RF-SORBENT/ RF-SORBENT-20

Об'єм: 6.5 мл/20мл

Зберігання: 2°C - 8°C

### ОПИС

DRG IgG-РФ-Сорбент (концентрат, # РФ-СОРБЕНТ/#РФ-СОРБЕНТ-20) може бути використаний з наборами ІФА для виявлення інфекційних захворювань IgA або IgM від DRG. Щоб уникнути інтерференції специфічного IgG і ревматоїдних факторів, сироватку пацієнта потрібно розглядати РФ-абсорбентом.

### РОЗВЕДЕННЯ ЗРАЗКА

Необхідно дотримуватися розведення зразка, яке описане в розділі **5.3 «Розведення зразків»** інструкцій для застосування, включених до набору ІФА Інфекційні захворювання IgA або IgM:

1. Розведіть кожний зразок пацієнта **1+50** з *Розчинником зразка*; напр. 10 мкл зразка + 0.5 мл *Розчинника зразка*. **Добре перемішати.**
2. Перед використанням, добре перемішайте IgG-РФ-Сорбент.
3. Розведіть цей попередньо розведений зразок **1+1** з *IgG-РФ-Сорбентом*; напр. 60 мкл попередньо розведеного зразка + 60 мкл *IgG-РФ-Сорбентом*. **Добре перемішати.**
4. **Витримати при кімнатній температурі не менше 15 хвилин, максимально до 2 годин і знову добре перемішати.**

Візьміть 100 мкл попередньо оброблених зразків для ІФА.



### ВИРОБНИК

DRG Інструментс ГмбХ  
вул. Фраунберг 18, 35039  
м. Марбург, Німеччина  
Тел: +49(0)64 21/170 00  
Факс: +49(0)64 21/17 00 50  
[www.drg-diagnostics.de](http://www.drg-diagnostics.de)  
e-mail: [drq@drq-diagnostics.de](mailto:drq@drq-diagnostics.de)



### УПОВНОВАЖЕНИЙ ПРЕДСТАВНИК

ТОВ «ДІАМЕБ ТРЕЙД»  
вул. Симона Петлюри, 25  
м. Івано-Франківськ, 76014  
тел.: +38 (0342) 775 122  
факс: +38 (0342) 775 123  
e-mail: [info@diameb.ua](mailto:info@diameb.ua)  
[www.diameb.ua](http://www.diameb.ua)

