

КОНТРОЛЬ ШОЕ - ПАТОЛОГІЯ

SABIO-A, Abnormal ESR Control



УПОВНОВАЖЕНИЙ ПРЕДСТАВНИК

Каталог. №: **SABIO-A**
Виробник: **Biota (Туреччина)**



Основною при проведенні аналізу є оригінал інструкції англійською мовою, вкладеної в набір. Номер і дата версії оригіналу та перекладу інструкції повинні співпадати.

Тільки для діагностики in vitro

ПРИЗНАЧЕННЯ

Контроль призначений для перевірки точності та достовірності швидкості осідання еритроцитів (ШОЕ), визначеної автоматичним аналізатором ШОЕ SABIO140, що працює безпосередньо з пробірками, які містять ЕДТА.

РЕАГЕНТИ

Контролі ШОЕ SABIO140 містять людські еритроцити, консерванти та стабілізатори в пробірках з ЕДТА.

ПРИГОТУВАННЯ

Готові до використання.

ЗБЕРІГАННЯ І СТАБІЛЬНІСТЬ

Зберігати при температурі 2 - 25°C. Не використовувати контролі ШОЕ SABIO140 після закінчення терміну придатності.

Не заморозувати контролі. Захищати від світла.

МАТЕРІАЛИ, ЯКІ НАДАЮТЬСЯ

1 x 3 мл. Контроль ШОЕ – норма

1 x 3 мл. Контроль ШОЕ – патологія

Готовий до використання у пробірках з ЕДТА.

НЕОБХІДНІ МАТЕРІАЛИ, ЯКІ НЕ НАДАЮТЬСЯ

SABIO140 Автоматичний аналізатор ШОЕ.

ПОПЕРЕДЖЕННЯ ТА ЗАСТЕРЕЖЕННЯ

Під час використання матеріалів людського походження слід дотримуватися усіх запобіжних заходів, які прийняті в лабораторній практиці.

Матеріали біологічного походження, які використовуються, слід розглядати як інфекційні залишки та утилізувати відповідно до закону.

Якщо продукт втратив колір, то це може бути ознакою деградації. **Не використовуйте продукт, якщо є ознаки погіршення якості.**

© Переклад на українську мову ТОВ «ДІАМЕБ»



ТАБЛИЦЯ ЗНАЧЕНЬ КОНТРОЛІВ

Цільний набір		Контроль - норма		Контроль - патологія	
[LOT]	140182010	[LOT]	1001A	[LOT]	1002A
			06.2020		06.2020
Метод/ Модель приладу	Одиниці	Середнє значення	Діапазон	Середнє значення	Діапазон
Зразок ЕДТА/SABIO140	Мм/год	7	1 - 13	39	25 - 53