

НАБІР ДЛЯ ОЧИЩЕННЯ КЮВЕТ, 2x100 МЛ

Cuvette cleaner kit, 2x100 ml

Кат. №: **VA0008CCL**

Дата випуску інструкції: **18-05-2022**

Версія **3.0**



Основою при проведенні аналізу є оригінал інструкції англійською мовою, вкладеної в набір. Номер і дата версії оригіналу та перекладу інструкції повинні співпадати.

Набір для очищення кювет

Розчин для очищення кювет для автоматичного миття кювет для конкретних клінічних аналізаторів серії Pictus®.

Код товару: **VA0008CCL** 2x100 мл (ml)
VA0008CC 100 мл (ml)

Тільки для використання в *in Vitro* діагностиці

ПРИЗНАЧЕННЯ ДЛЯ ВИКОРИСТАННЯ

Розчин для очищення кювет використовується для автоматичного знезараження та очищення кювет після кожного використання, а також для видалення будь-яких відкладень реагентів, компонентів крові, сечі, ліквору та ліпопротеїдів.

Розчин для очищення кювет сумісний лише з конкретними аналізаторами клінічної хімії Pictus.

Для отримання додаткової інформації перегляньте Посібник користувача інструменту.

ІНГРЕДІЄНТИ

Змішані амфотерні детергенти
Гідроксид натрію < 2.0 %

ЗАСТЕРЕЖЕННЯ

- Усі зразки рідини організму слід вважати потенційно інфекційними матеріалами. Обробляйте всю кров та інші потенційно інфекційні матеріали з відповідними запобіжними засобами. Використовуйте рукавички, маски та халати, якщо передбачається контакт з кров'ю.
- Будь ласка, зверніться до MSDS, пов'язаного з реагентом.
- Дотримуйтесь належної лабораторної практики (GLP) під час поводження з реагентами.

ПІДГОТОВКА РЕАГЕНТУ

- Для того, щоб підготувати робочий розчин: обережно змішайте 2 мл (ml) очищувача кювет з 1 л (l) лабораторної води 2-го типу (бажано деіонізованої, нижче ≤ 8 мкС/см ($\mu\text{S}/\text{cm}$)).
- Залиште реагент при кімнатній температурі протягом не менше 12 годин.

ЗАМІНА РЕАГЕНТУ

- Особа, що встановлює реагент, повинна бути навченим лабораторним працівником.
- Уникати забруднення пилом або мікробного забруднення трубопроводу і реагентів. Не зливати і не змішувати залишки реагенту з одного контейнера в інший.

ЗБЕРІГАННЯ, СТАБІЛЬНІСТЬ І УТИЛІЗАЦІЯ РЕАГЕНТА

- Зберігати Очищувач кювет між +4 та 32 °C (°C).
- Термін зберігання Розчинів для очищення кювет становить 24 місяці з дати виготовлення, якщо зберігати їх у встановленому діапазоні температур.
- Стабільність у процесі експлуатації діє до закінчення терміну придатності.
- Не використовуйте реагент після закінчення терміну придатності, зазначеного на етикетці контейнера.
- Після відкриття закривайте флакони якомога швидше, щоб уникнути погіршення стану розчин/реагенту.
- Не використовуйте реагент після заморожування.
- Розчини не слід використовувати після тривалого впливу сонячного світла або високої температури або коли вони здаються каламутними.
- Утилізуйте відходи, невикористаний продукт та забруднену упаковку відповідно до місцевих норм.

У разі будь-яких проблем зверніться до місцевого офіційного дистриб'ютора Diatron для усунення несправностей.

Символи, сигнальне слово, положення про безпеку та застереження на VA0008CC (Розчин для очищення кювет):



ЗАСТЕРЕЖЕННЯ

H290, H315, H319,
P262, P273, P280,
P302+P352,
P305+P351+P338



ВИРОБНИК

ДІАТРОН МІ РЛС
вул. Таблас, 39
Н-1097 Будапешт, Угорщина
Тел.: +36 14369800
Факс: +36 14369809
www.diatron.com



УПОВНОВАЖЕНИЙ ПРЕДСТАВНИК

ТОВ «ДІАМЕВ ТРЕЙД»
вул. Симона Петлюри, 25
м. Івано-Франківськ, 76014
тел.: +38 (0342) 775 122
факс: +38 (0342) 775 123
e-mail: info@diameb.ua
www.diameb.ua

