

РЕАГЕНТ ДЛЯ ПРОВЕДЕННЯ ГЕМОЛІЗУ

Hemolysis Reagent

Каталог. №: **Y04605**

Дата випуску інструкції: **2022-05-27**

Версія **01**



Основою при проведенні аналізу є оригінал інструкції англійською мовою, вкладеної в набір. Номер і дата версії оригіналу та перекладу інструкції повинні співпадати.

Кат. №: **Y04605** **Вміст**
5 x 100 мл (mL)

СКЛАД

- Очищена вода
- 0.5 г/л (g/L) азиду натрію

СТАБІЛЬНІСТЬ ТА ЗБЕРІГАННЯ РЕАГЕНТУ

Умови: Закрити негайно після використання.

Зберігання: при 2 °C (°C) - 25 °C (°C)

ЗАСТЕРЕЖЕННЯ ТА ПОПЕРЕДЖЕННЯ

1. Реагент для проведення гемолізу містить азид натрію (0.5 г/л (g/L)) в якості консерванту. Не ковтати! Уникати потрапляння на шкіру та слизові оболонки! Відомо, що азид натрію утворює азид свинцю або міді в лабораторному водопроводі, який може вибухнути при перкусії. Після утилізації рідин, що містять азид натрію, ретельно промийте дренажі водою.
2. Будь ласка, зверніться до паспортів безпеки та вживайте необхідних заходів безпеки при використанні лабораторних реагентів.
3. У разі виникнення інциденту, пов'язаного з продуктом, повідомте про це виробника та компетентний орган, якщо це необхідно.

ПОВОДЖЕННЯ З ВІДХОДАМИ

Дотримуватися місцевих вимог законодавства.



ВИРОБНИК

Діалаб ГмбХ

Виробництво та продаж хіміко-технічної продукції та лабораторних приладів в ІЗ НОЕ-Зюд, Хондаштрассе, Обдъект М55, 2351

Вінер-Нойдорф

Тел.: +43 (0) 2236 660910-0,

Факс: +43 (0) 2236 660910-30,

e-mail: office@dialab.at



УПОВНОВАЖЕНИЙ ПРЕДСТАВНИК

ТОВ «ДІАМЕБ ТРЕЙД»
вул. Симона Петлюри, 25
м. Івано-Франківськ, 76014
тел.: +38 (0342) 775 122
факс: +38 (0342) 775 123
e-mail: info@diameb.ua
www.diameb.ua

